

Bitácora

Modelo: Cavi Color 9-1

Modelo:

Marca: Siluet Perfect

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

-5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlos en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

Cavi Color 9-1 Manual de Uso



Precauciones de seguridad

La siguiente información se proporciona para la correcta utilización del dispositivo. La información incluye no solo las instrucciones de seguridad, sino también el uso efectivo y adecuado de los productos.

Seguridad del equipo

- Asegúrese de que el enchufe eléctrico utilizado en el dispositivo coincida con el tomacorriente eléctrico utilizado para suministrar energía al dispositivo.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados al dispositivo como se describe.
- No bloquee las ranuras de ventilación del dispositivo.
- El dispositivo solo se puede utilizar para los fines descritos en este manual. El proveedor no se hace responsable de los daños debidos a un uso incorrecto.
- No abra el dispositivo y/ o realice reparaciones, limitadas a técnicos capacitados profesionalmente.
- Asegúrese de que la máquina esté apagada y desconectada si se realiza algún trabajo de mantenimiento en la máquina.
- Las piezas de mano deben colocarse en el soporte de la pieza de mano cuando no estén en uso
- Tenga cuidado de que los cabezales y almohadillas de los dispositivos de mano no se caigan o estén sujetos a fuertes impactos.
- Está estrictamente prohibido desmontar o alterar la pieza de mano.
- Las cabezas y almohadillas de las piezas de mano deben limpiarse con alcohol medicinal después de cada sesión.
- Si no está en funcionamiento, apague el dispositivo para evitar la oxidación de los cabezales y almohadillas.
- El equipo no debe utilizarse de forma continua más de 2 horas. Se sugiere tener un descanso de 10 a 15 minutos para una sesión completa de 45 minutos.
- No utilice objetos afilados en la pantalla táctil.
- Mantenga la pantalla táctil limpia (incluido el polvo y los derrames cosméticos) con un paño suave y seco.
- No vierta sustancias líquidas en la pantalla de visualización LCD; el alcohol y los detergentes están prohibidos.
- No opere el panel con las manos mojadas.
- No coloque la máquina cerca del agua o en un ambiente húmedo.
- Utilice únicamente gel conductor junto con los cabezales y almohadillas de mano.



ADVERTENCIA IMPORTANTE: Este dispositivo no es un producto médico y no está destinado al diagnóstico, control, sesión o alivio de ningún tipo de enfermedad o lesión.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

La seguridad y el bienestar de su cliente es de suma importancia durante la sesión. Esto depende de la capacidad y el conocimiento del operador. Siempre considere la experiencia del cliente y deténgase inmediatamente si el cliente tiene algún dolor o molestia durante la sesión.

A continuación se muestra una lista de las principales contraindicaciones. Es su responsabilidad interrogar a sus clientes para asegurarse de que su salud sea lo suficientemente buena como para someterse a una sesión de terapia. En caso de duda, consulte al médico de cabecera o al médico para obtener más detalles.

Seguridad del paciente

No se use en:

- Cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, garganta, pezones, corazón, genitales, marcas de nacimiento y áreas óseas.
- Mujeres embarazadas y mujeres en período menstrual.
- Partes del cuerpo donde se implantó metal, plástico o silicona.
- Dispositivos médicos y eléctricos, como audífonos, marcapasos, etc.
- Personas que se sientan mal o personas con epilepsia.
- Heridas abiertas.
- Áreas perforadas en el cuerpo, p. Ej. barra del vientre. Todas las joyas deben quitarse antes de una sesión.
- Personas con
- Hipertensión,
- Trastornos de la coagulación sanguínea,
- Diabetes,
- Enfermedad de la piel,
- Afecciones cardíacas o pulmonares,
- Lupus eritematoso,
- Problemas vasculares,
- Flebitis,

- Cáncer progresivo,
- Infecciones y erupciones cutáneas,
- Enfermedad mental
- Fiebre
- Sesión de corticoides a largo plazo,
- Sesión anticoagulante,
- Cualquier trastorno inflamatorio progresivo,
- Depresión, consumo de drogas recreativas
- Lipoaspiración / liposucción menos de 6 meses,
- Beber en exceso o
- Personas que reciben hormonas sessio
- Niños menores de 12 años.
- La persona sufre una enfermedad a largo plazo con medicamentos o la piel puede sufrir moretones con facilidad, consulte al médico de cabecera o al médico antes de una sesión.
- Durante la operación de cavitación por ultrasonido y radiofrecuencia, los cabezales generarán energía cálida para la piel. Esto es normal, sin embargo, el operador debe preguntarle al cliente si está cómodo o no. Si está demasiado caliente, ajuste la energía a un nivel más bajo.
- Las cabezas y almohadillas de la pieza de mano deben estar en completo contacto con la piel del cliente antes de iniciar la operación.
- La energía de la interfaz debe ajustarse a la configuración más baja después de cada sesión (la energía debe ajustarse para la sesión de cada individuo según los requisitos del cliente).
- No use etanol, acetona o cualquier otro producto inflamable en la piel del cliente antes de comenzar una sesión. Si es necesario, limpiar la piel con agua y jabón.



ADVERTENCIA IMPORTANTE: Detenga la sesión de inmediato si el cliente experimenta alguna molestia o dolor, especialmente el cliente con un porcentaje considerable de grasa corporal.

INTRODUCCION

Cavitacion

La cavitación es un fenómeno biológico que consiste en la formación de burbujas entre las células que implosionan por la acción de un ultrasonido de baja frecuencia. Esto crea ondas de choque que dañan selectivamente las membranas de los adipocitos (células grasas), derramando la grasa líquida en el sistema linfático y finalmente en el hígado para ser metabolizada. Está científicamente comprobado que después de una sesión de cavitación, el exceso de líquido o toxinas linfáticas se drenan del cuerpo a través del sistema urinario.

Esto se puede notar en la primera sesión después de solo 10 minutos. También habrá un aumento significativo de la diuresis (la producción de orina por los riñones) en las horas posteriores a la sesión y esto generalmente continúa hasta el día siguiente a medida que el cuerpo metaboliza el exceso de líquido y toxinas.

Se puede observar una ligera acidez y cambio en el olor y color de la orina inmediatamente después de la primera sesión con la cavitación ecográfica, especialmente en clientes con un porcentaje considerable de grasa corporal.

Radio Frecuencia

Al estar integrado con la tecnología de radiofrecuencia y la radiofrecuencia más avanzadas, el instrumento puede llegar directamente al cuerpo graso profundamente arraigado y tener la excelencia de la radiofrecuencia de posicionamiento específico. En el estado de actividad rápida, el tejido de las células grasas puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y eliminar el exceso de grasa y toxinas del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación enterohepática y la linfa y, en última instancia, lograr el efecto de disolver la grasa. Las partículas de diamante de diferentes tamaños pueden frotar la piel a lo largo de su patrón, ajustar la fuerza de succión por medio de aspiración y frotar con fuerza de presión negativa para explotar directamente la grasa espesa. Por lo tanto, los efectos son muy obvios: mejoran la circulación sanguínea, aceleran la descomposición de la grasa, eliminan los desechos, mejoran el efecto de eliminar la celulitis, mejoran eficazmente el estado del tejido areolar, eliminan la grasa rebelde y mejoran la condición de absorción suficiente de los productos dietéticos.

Vacuum RF

Para remodelar el cuerpo y el rostro. La máquina de explosión de grasa Vaccum + RF de pérdida de peso puede promover el metabolismo de los tejidos, repeler la celulitis, lo que produce gránulos de

grasa en diferentes profundidades e impactante hace energía de fusión, y el receptor más profundo puede obtener gránulos en 3 cm de espesor de piel, y una rápida expansión y rapidez. Calentamiento de la pared celular que excede los límites elásticos y surge células rotas, de modo que la combustión de ácidos grasos al mismo tiempo se rompe de una olla, no solo quema el consumo de ácidos grasos sino también vaciando más directamente de manera tan rápida reducir el tamaño de gránulo.

Eliminación de arrugas faciales cuadrupolo RF, estiramiento y lifting

El electrodo de acoplamiento capacitivo de cabeza de RF facial se utiliza para transmitir energía de ondas de radio y generar un campo eléctrico para entrar en el tejido subcutáneo a través de la superficie de la piel. En la alta frecuencia de 450 kHz, este campo eléctrico cambia su polaridad 450 000 veces por segundo. Para responder al rápido cambio de electrodo, también se cambian las direcciones de las partículas eléctricas en la piel. En ese momento, la resistencia eléctrica natural del tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Como el colágeno de la dermis papilar puede encogerse inmediatamente cuando la temperatura está dentro del rango de 60 a 70 grados centígrados, después del tratamiento de arrugas, el cliente puede sentir inmediatamente los efectos de estiramiento de la piel a medida que se levanta y reafirma. Cuando el colágeno se produce de forma continua, el grosor y la densidad de la dermis papilar de la piel pueden aumentar para eliminar las arrugas, eliminar las cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel y hacerla rubia y suave. Mientras aumenta el colágeno, se genera piel fresca en la posición de operación y las arrugas son eliminadas por gran cantidad de células. Además, cuando se separa la corteza sin elasticidad o con capa córnea gruesa en la zona con arrugas, la piel circundante también se renovará.

RF pequeña de tres polos para la cara y los ojos

Un lifting facial de tres polos es una técnica cosmética no invasiva y no quirúrgica que mejora de forma segura y eficaz la salud y la apariencia de la piel. Un lifting facial de tres polos utiliza tecnologías desarrolladas en los campos médico y de fisioterapia para activar los productos químicos naturales de la piel responsables para la salud y la vitalidad. Un lifting facial de tres polos proporciona resultados estéticos satisfactorios con menos riesgo de efectos secundarios en comparación con un lifting facial tradicional. Se ha demostrado que el procedimiento de estiramiento facial es seguro y eficaz, y ofrece resultados a una fracción del costo de los procedimientos tradicionales.

Puede eliminar arrugas y tensar la piel, blanquear y suavizar la piel, reducir los poros, disipar la cuenca del ojo negro, la bolsa y las patas de gallo, eliminar la piel amarilla, eliminar el edema facial, eliminar la toxina facial, levantar la cara, acelerar la secreción de piel cuidado del cuello, eliminación de arrugas del cuello, tensar y blanquear la piel.

Microcorriente de fotones para el cuidado de la piel

La energía de la irradiación puede promover el crecimiento de las células 5 veces, a través del citocromo inicial, puede promover la transformación de la dextrosa en ATP y aumentar la energía de la metabolización de las células para estimular la producción de más proteína de colágeno. Las diferentes luces tienen un impacto diferente en la piel.

Efecto Curativo:

- 1). Rojo: Vitalize es adecuado para cualquier piel, promueve la circulación sanguínea y regenera la proteína de colágeno para suavizar la piel y curar la xerodermia, la exudación, la pérdida de cabello y la foliculosis.
- 2). Azul: Calm es adecuado para pieles sensibles, grasas y comedas: disminuye y elimina el acné bacillus para eliminar el acné, el buccino, promover la proteína compuesta con oseína, activar la piel, tensar la piel flácida y el parpadeo de la gravedad.
- 3). Verde: Equilibra Normaliza las glándulas sebáceas, Reduce las espinillas y llagas, equilibra la humedad.
- 4). Morado: Drena Renovar la piel, reducir las arrugas
- 5). Naranja: aclara, blanquea, descompone el pigmento y suaviza los sustos.
- 6). Turquesa: Defensa fortalece la capacidad de proteger la piel, calmarla, liberar el estrés,
- 7). Blanco: guía guía de la piel para absorber nutrientes y anti-envejecimiento

Sonda fría para calmar la piel

La temperatura de la piel será un poco alta después del tratamiento de la sonda de cavitación, la sonda de vacío y las sondas de rf. Luego use la sonda fría, ayuda a calmar la piel y encoger los poros.










Beneficios

- Seguro e indoloro
- Sin efectos secundarios
- Reducción de grasa y modelado corporal no invasivos
- Apto para todo tipo de piel
- Máquina compacta

- Fácil de operar
- Resultados duraderos

Informacion de producto

Package Contents

	Cabezal de Cavitation 40 K (1)
	RF para ojos (1)
	RF Facial (1)
	RF Corporal (1)
	Vacuum RF (1)
	Photon (1)
	Martillo Frio (1)
	2 paneles chicos
	6 Paneles Grandes

Informacion de producto




Asegúrese de que la energía esté apagada mientras realiza la instalación.

Panel de Control



COMO USAR

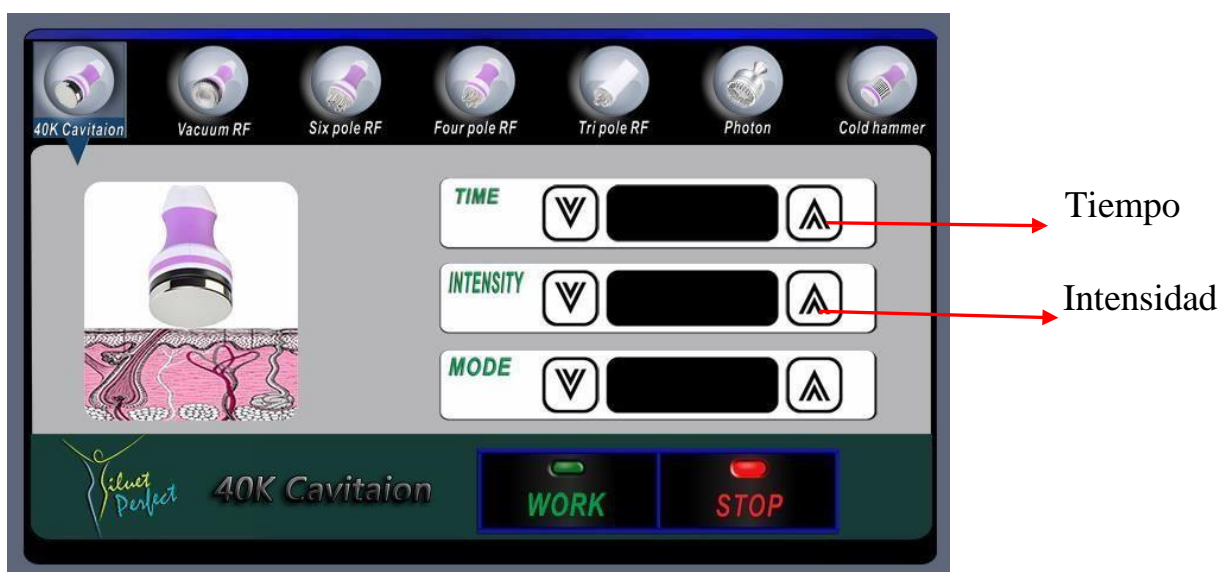

Paso 1

Cavitación ultrasónica: disminución de las células grasas grandes (15-20 minutos)


1. Ajuste el tiempo (el tiempo máximo es 60 min.)
2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor.
3. Seleccione el modo de tipo para diferentes niveles de vibración (modo ABCD: la velocidad se vuelve más rápida)
4. Pulse "TRABAJO" para iniciar la fuerte explosión de ondas de sonido.

Usando movimiento en espiral, sostenga la cabeza gruesa de explosión de onda de sonido fuerte y apúntela a la posición para perder peso; el tiempo para esto es de 15 a 20 minutos.

(Sonido fuerte que ahorra explosión, la cabeza de grasa puede alcanzar la capa de grasa directamente usando un sonido fuerte, vibrar la grasa obstinada en profundidad a la velocidad máxima y producir numerosas bolsas de aire de vacío dentro y fuera de las células de grasa, impactar de manera robusta las células de grasa para generar una explosión introvertida y desintegrarse grasa en ácidos grasos libres.)

Notas:

1. Extienda gel o esencia sobre las posiciones tratadas.
2. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en contacto con la piel de los clientes.

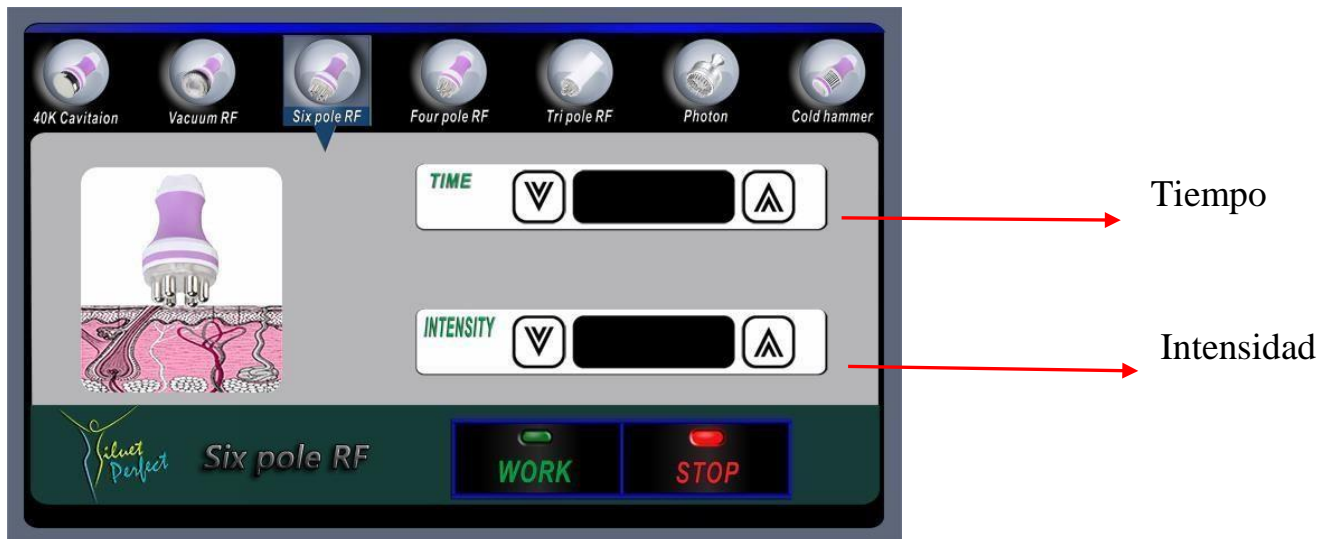


Paso 2

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos)
2. Ajuste la intensidad de RF, del nivel más bajo al más alto según la condición del cliente (se recomiendan 3 puntos)
3. Presione TRABAJO para comenzar el tratamiento.

Aplique gel al cabezal de liposucción RF Multietapa, apúntelo a la posición para perder peso y opere en técnica de tracción (arrastre la grasa en la posición para perder peso hasta la posición donde está más cerca de la glándula linfática) durante unos 20 minutos.

Notas:

1. Utilice gel o esencia en las posiciones tratadas de manera uniforme
2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo.
3. No use aceite esencial como medio.
4. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en uso.

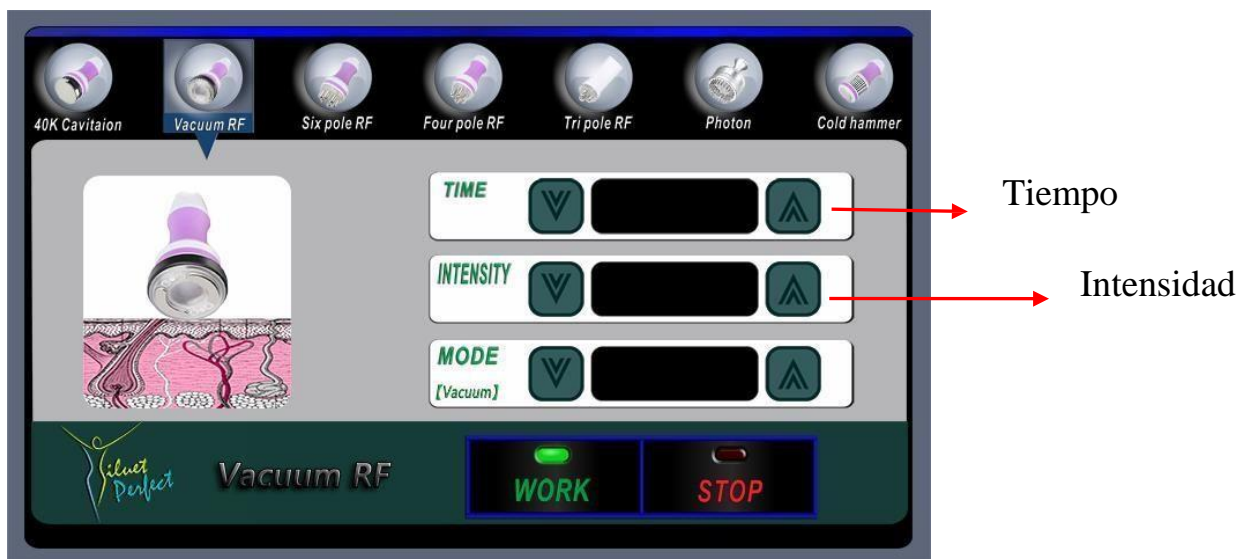

Paso 3


1. Ajuste el tiempo (15 ~ 20 minutos)
2. Ajuste la intensidad de succión de vacío y el tiempo de liberación, desde el nivel más bajo hasta el más alto según la condición del cliente.
3. Ajuste la intensidad de RF, se recomiendan 2 puntos.
4. Pulse TRABAJO para comenzar el tratamiento.

Aplique gel al cabezal de vacío de presión negativa, apúntelo a la posición para perder peso y opere en la técnica de tracción (mejore la celulitis y realice el adelgazamiento) durante unos 20 minutos.

Notas:

1. Utilice aceite en las posiciones tratadas para peluquería de manera uniforme.
2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo.

3. En funcionamiento, comience a tirar solo después de que el cabezal de presión negativa esté unido a la piel.
4. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en uso.

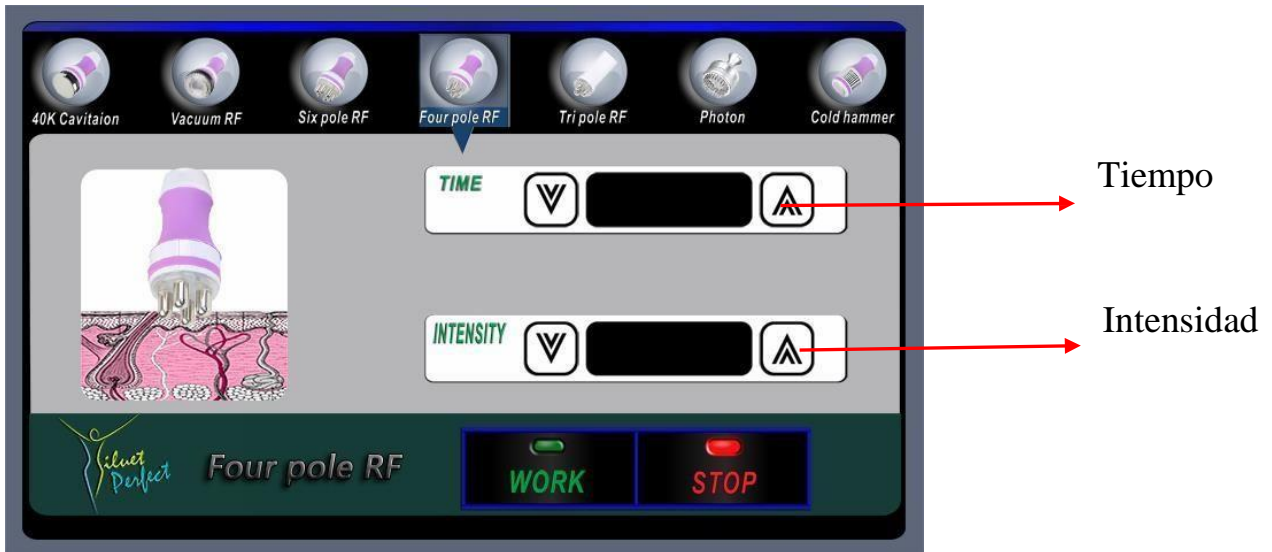


Paso 4

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos)
2. Ajuste la intensidad de RF, desde el nivel más bajo hasta el más alto según la condición del cliente (se recomiendan 3 ~ 6 puntos)
3. Presione TRABAJO para comenzar el tratamiento.

Extienda gel o esencia suavizante de arrugas en las posiciones tratadas, opere con el cabezal de RF facial durante 15-20 minutos con principalmente el movimiento en espiral en la cara.

Notas:

1. Utilice gel o esencia en las posiciones tratadas de manera uniforme
2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo.
3. Para recibir tratamiento, los clientes deberán quitarse los artículos metálicos de las manos y el cuerpo; No haga que el cabezal de la sonda de tratamiento se dirija a los ojos de los clientes.

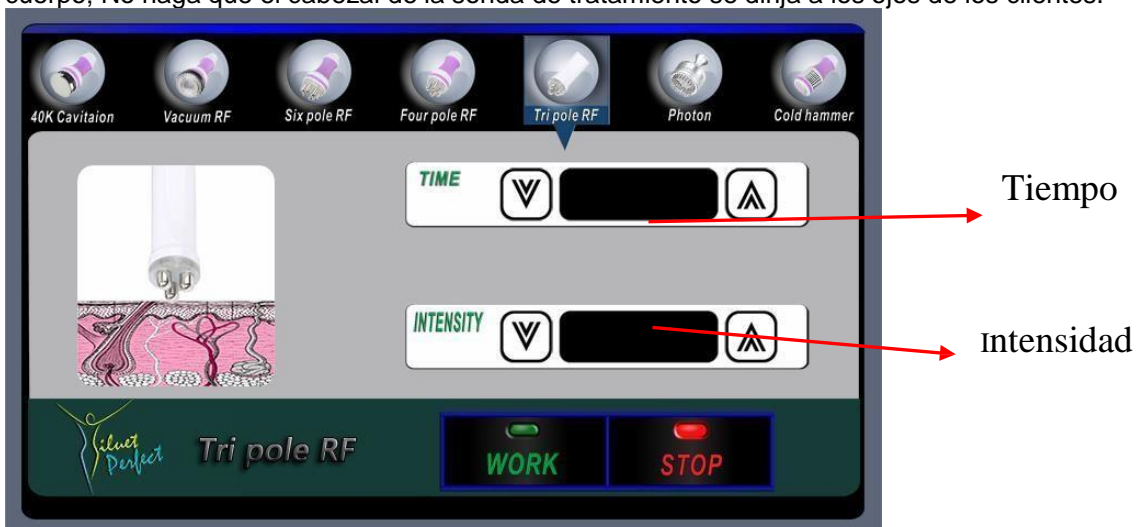

Paso 5


1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos)
 2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes. En general, los niveles 1 a 6 están bien).
 3. Seleccione el modo de tipo para diferentes niveles de vibración (modo ABCD: la velocidad se vuelve más rápida)
- Presione "trabajar" para iniciar el tratamiento

Seleccione el modo de tipo para diferentes modelos eléctricos:

La selección de modo determina el intervalo entre ciclos, mientras que la selección de intensidad determina la cantidad de corriente. Por lo tanto, el Modo C tiene el intervalo más corto y los niveles

actuales son los más altos. El modo A tiene el intervalo más largo, por lo que los niveles actuales son los más bajos. El modo A es mejor para tratamientos galvánicos mientras que el modo C es mejor para tratamientos con microcorrientes.

1. Use una crema especial en la cara, como geles, y luego sostenga el mango BIO con la mano.
2. Mueva la sonda desde las partes centrales de la cara hacia el exterior, de abajo hacia arriba.
3. Métodos de lifting facial: desde la mandíbula inferior hasta la oreja, desde la nariz hasta las sienes, moviéndose hacia afuera desde la frente central.
4. Métodos de levantamiento de ojos: desde la esquina interior hasta la sien, la sonda no debe estar demasiado cerca de las áreas alrededor de los ojos, y debe ser suave en la operación.

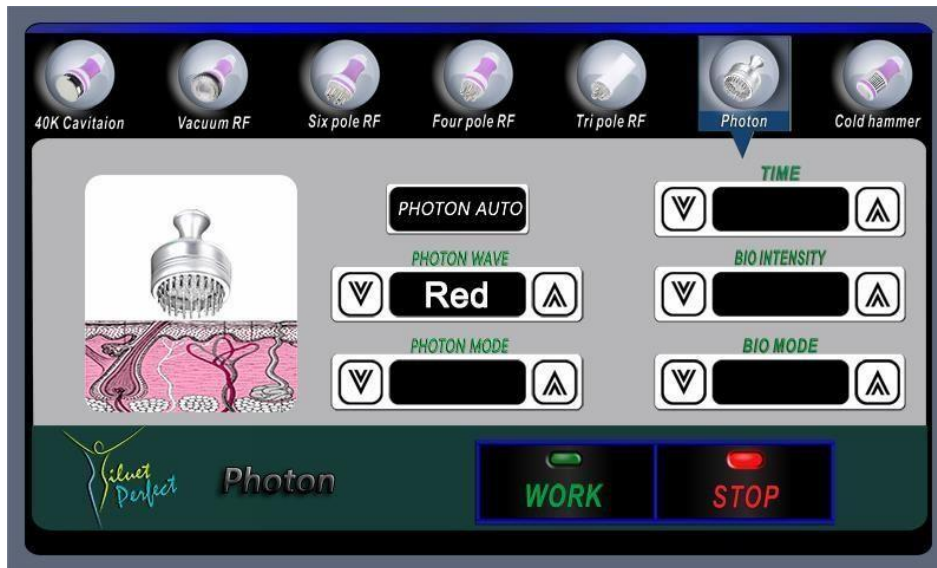

Paso 6

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 30 minutos)
 2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes. En general, los niveles 1 a 6 están bien).
 3. Seleccione la onda de fotones. Las longitudes de onda aparecen en diferentes colores (rojo, verde, azul ...)
 4. Seleccione el modo fotón y el modo BIO.
- Presione "trabajar" para iniciar el tratamiento




Paso 7

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 30 minutos)
2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes).
3. Pulse "trabajar" para iniciar el tratamiento

Notas:

1. Primero limpie las partes operativas y cubra con crema especial las partes operativas.
2. Debe desmontar relojes y metales antes de la operación.
- Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares y piel sensible no pueden usarlo.
4. No coloque el equipo en lugares húmedos.
5. No opere demasiado tiempo en la misma ubicación de la piel.
6. Ajuste la potencia de salida BIO de pequeña a grande.

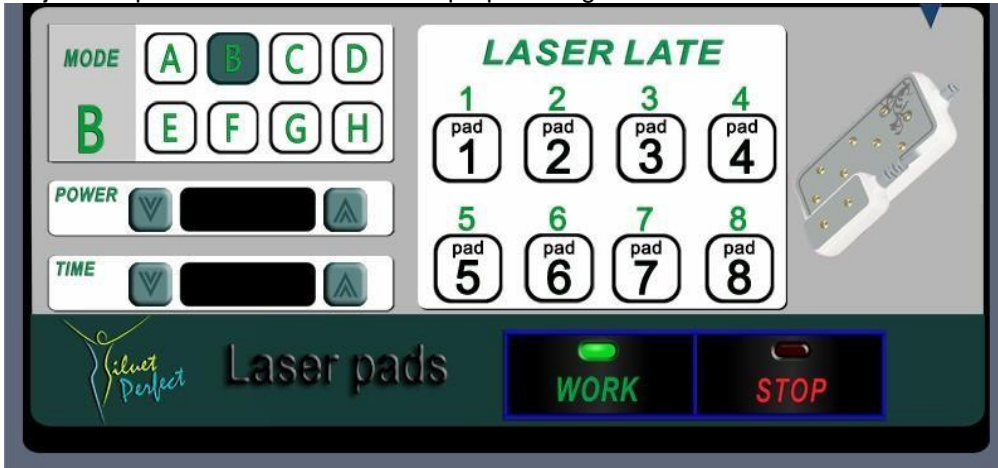

Paso 6


1. Limpie la piel, coloque la sonda LipoLaser en el cuerpo donde desea perder grasa. Luego use un cinturón para mantener la almohadilla en



posición cómoda mientras un técnico capacitado en LipoLaser coloca dos paletas multilaseres y dos laseres más pequeños en las áreas objetivo. Luego recuéstese, relájese, lea o lo que sea que desee.


Notas:

1. Primero limpie las partes operativas y cubra con crema especial las partes operativas.
2. Debe desmontar relojes y metales antes de la operación.
- Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares y piel sensible no pueden usarlo.
4. No coloque el equipo en lugares húmedos.
5. No opere demasiado tiempo en la misma ubicación de la piel.
6. Ajuste la potencia de salida BIO de pequeña a grande.

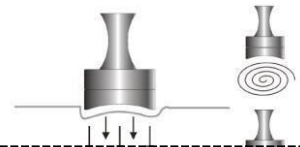

IMPORTANTE

- Ajuste gradualmente el nivel de intensidad de bajo a alto.
- No aplique la cabeza de la pieza de mano en el área del corazón del cliente.
- Cuando desee detener el tratamiento durante la sesión, presione el botón STOP en el panel antes de retirar el cabezal de la pieza de mano de la piel; de lo contrario, el cliente puede sentir una sensación de descarga eléctrica.
- Establezca la hora del programa sugerida.

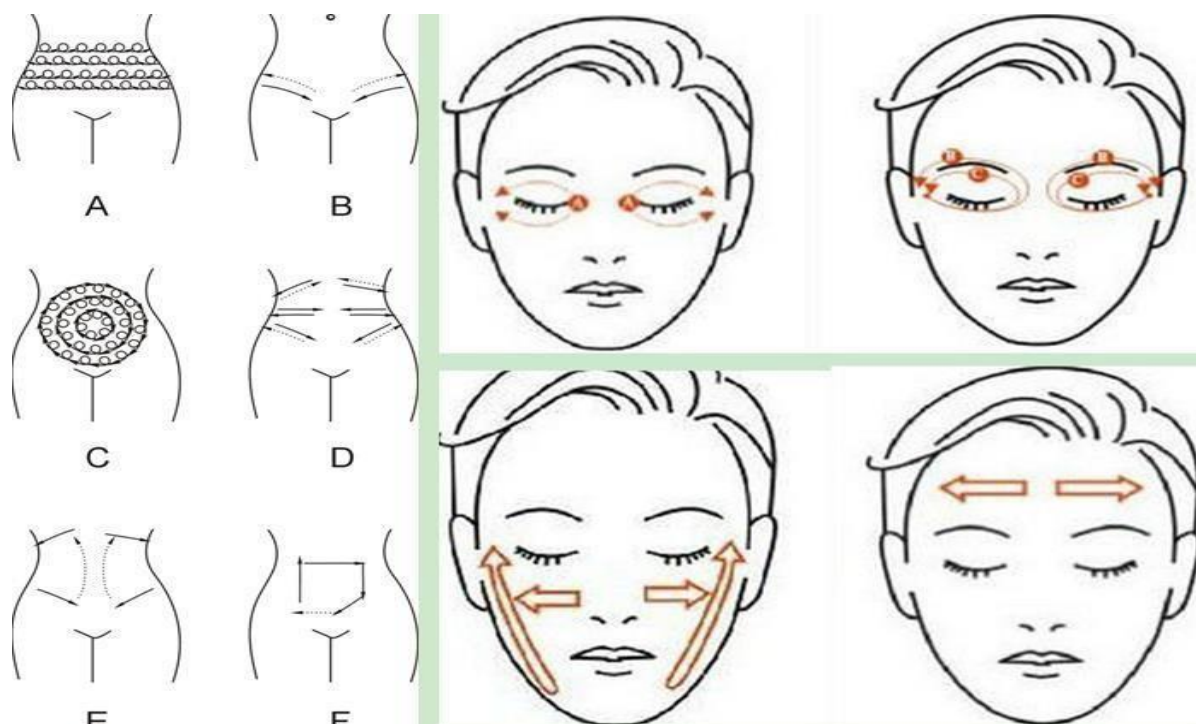

TÉCNICAS DE APLICACIÓN SUGERIDAS PARA CABEZAL DE PIEZA DE MANO

En el abdomen

1. Tome la cabeza ultrasónica, haga movimientos circulares, desde ambos lados de la cintura, tire hacia el medio. Consulte la imagen A.
2. Tome la cabeza de RF, con movimiento circular entre los pechos y tirón inclinado en la ingle, para abrir los puntos. Consulte la imagen B.
3. Gesto 2, Al ombligo como centro, de exterior a interior, hacer pequeños círculos para disolver la gordura redundante. Consulte la imagen C.
4. Gesto 3, Inclinarse tirando de la gordura entre ambos lados de la cintura, finalmente tirar de la ingle, agotar el ácido graso con drenaje linfático. Consulte la imagen D.
5. Gesto 4, Inclinarse, tirar de la grasa debajo de las costillas hasta la ingle, luego devolverla debajo de las costillas, repetirlo algunas veces. Consulte la imagen E.
6. Gesto 5, Seguir el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el ano recto, masajear y promover la peristalsis de los intestinos, evacuar los intestinos. Consulte la imagen F.

En piernas y brazos, se sugiere realizar movimientos circulares, inclinados o de tracción para llevar la grasa al sistema linfático.

CONSEJOS DE INSTRUCCIÓN PARA EL CLIENTE

Es ESENCIAL que sus clientes sigan estas instrucciones para obtener resultados óptimos.

SEMANA ANTES DE LA SESIÓN SI ES POSIBLE - SI NO, DÍAS ANTES:

- Ingesta abundante de agua: más de 1 litro al día
- Está bien tomar TODOS los medicamentos, incluso los diuréticos (sustancia que aumenta el flujo de orina)
- ¡No coma en exceso!
- ¡¡NO BEBA ALCOHOL LA NOCHE ANTES DE LA SESIÓN !!

DÍA DE LA SESIÓN - ANTES DE LA SESIÓN:

- Beba 1 litro de agua (¡el café, té, cola NO cuentan como agua!)
- MANTENGA los diuréticos hasta el día siguiente (si corresponde)
- Tome medicamentos normales pero NO tome diuréticos
- No beba cafeína 3-4 horas antes de la sesión
- No beba bebidas carbonatadas 3-4 horas antes de la sesión
- No coma mucho antes de la sesión (coma pero no se exceda)
- No ayune antes de su sesión. No comer hará que su cuerpo entre en modo de inanición y los resultados de su sesión no serán tan significativos.

DÍA DESPUÉS DE SESIÓN

- Continuar con la ingesta abundante de agua
- Reanudar diuréticos (si corresponde)

- Cuide su apetito, ya que puede aumentar - NO aumente las calorías normales
- ¿Hacer ejercicio si es posible? Recuerde que se ha vertido una gran cantidad de grasa en el sistema circulatorio y es importante quemar todo lo que pueda para evitar que se vuelva a almacenar.

POR FAVOR RECUERDE QUE SE HA PERDIDO UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE GRASA DE UN ÁREA DE SU CUERPO Y EL CAMBIO DRAMÁTICO ES PERMANENTE SOLO SI NO LO INVIERTE POR:

- BEBIENDO ALCOHOL
- COMER BINGE (coma de 4 a 6 comidas al día y distribuya su ingesta de calorías)
- COMER MUCHOS CARBOHIDRATOS

Se pueden incluir suplementos nutricionales y un régimen de ejercicio durante el curso para estimular la actividad metabólica y apoyar un estilo de vida saludable.

MANTENIMIENTO

Higiene y limpieza

Antes de realizar la limpieza, asegúrese de que el sistema esté desconectado de la red eléctrica. La unidad principal se puede limpiar periódicamente con un paño ligeramente húmedo.

Para reducir el riesgo de contaminación cruzada, las piezas de mano y las almohadillas deben limpiarse antes y después de cada sesión. Elimine cualquier residuo de las piezas de mano y las almohadillas con un paño ligeramente húmedo. Esterilice las piezas de mano y las almohadillas con un líquido esterilizante patentado o una toallita. Los materiales sucios deben eliminarse de manera adecuada.

NÓTESE BIEN. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o disolventes, ya que pueden dañar el sistema.



多极射频仪

射 频: 1MHZ
 负 压: 100KPA
 电 流: 100W
 毛 重: 12kg
 强 声 波: 40KHZ
 光 色: LED红光
 电 压: 110V/220V
 包装尺寸: 42*43*52cm
 屏 幕: 7寸彩色液晶触屏

产品配件: 强声波头*1 负压头 *1 三极射频头*1
 四极射频头*1 六极射频头*1
 亚克力支架板*1 说明书*1

HIGHLIGHTS 卖点亮点

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

