

MANUAL DE USUARIO CAVI CRYSTAL

MARCA: SILUET PERFECT.



Principios de Funcionamiento

Sistema de eliminación de grasa por ultrasonido.

Con una cabeza de onda de sonido fuerte colectiva, se puede emitir una onda de sonido fuerte de 40000 HZ para hacer vibrar las células grasas a la máxima velocidad y producir numerosas bolsas de aire de vacío dentro y fuera de las células grasas, impactar con fuerza las células grasas para generar una explosión introvertida y desintegrar los triglicéridos en glicerol y liberarlos ácidos grasos. Luego, las ondas de RF a una frecuencia de 1 M HZ se utilizan para agotar el glicerol integrado y los ácidos grasos libres a través de la circulación hepatoenteral. Finalmente, el RF de vacío y el electrodo de energía se utilizan para posicionar y apretar la grasa. En física, se conoce como "cavitaciones". La explosión introvertida de microesporas dentro y fuera de la célula puede conducir a un movimiento molecular mejorado y un mayor nivel de energía y esto finalmente causará la ruptura de las células grasas y, por lo tanto, logrará los efectos de la construcción del cuerpo y la pérdida de peso..

Parámetros Técnicos

Entrada de fuente de alimentación: 110V / 220V 60HZ / 50HZ Potencia: 130W

Cabezal de cavitación 40K: Salida de fuente de alimentación: 150V Frecuencia: 40KHz Potencia: 25W

Vacío + cabezal RF bipolar: Salida de fuente de alimentación: 66V Frecuencia: 450K Potencia: 95W

BIO cabeza:

Salida de fuente de alimentación: 24V Frecuencia: 1.5K Potencia: 1W

Cabezal RF tripolar:

Salida de fuente de alimentación: 66V Frecuencia: 450K Potencia: 35W

Cara RF cabeza:

Salida de fuente de alimentación: 66V Frecuencia: 450K Potencia: 35W

Función del instrumento y principios de tratamiento











1. Mango ultrasónico de 40 kHz



Con una cabeza de onda de sonido fuerte colectiva, se puede emitir una onda de sonido fuerte de 40000 HZ al cuerpo humano para impactar ferozmente a las células grasas y provocar un movimiento de fricción entre las células grasas. Esto puede causar un consumo efectivo de calorías y humedad en las células grasas y reducir el tamaño de las células grasas. Además, de la onda de sonido, la vibración puede causar un fuerte impacto de las células grasas para hacerlas explotar instantáneamente, reducir la cantidad de células grasas y lograr así los efectos de eliminar la grasa.

Operación:



1. Presione    para ajustar el tiempo.
2. Seleccione la fuerza haciendo clic   para incrementar la fuerza o clic    para disminuirla..
3. Presione  para empezar el tratamiento.
4. Presione  para pausar el tratamiento.

Modos:

"A" es continuo trabajando durante 3 segundos y discontinuo durante 2 segundos. "B" es un trabajo continuo durante 4 segundos y discontinuo durante 3 segundos. "C" es continuo trabajando durante 1 segundo y discontinuo durante 1 segundo.

"D" es un trabajo continuo durante 0,5 segundos y discontinuo durante 0,5 segundos. 2. Vacuum

Cabezal RF bipolar




Para la remodelación del cuerpo y la cara y la pérdida de peso, la máquina de explosión de grasa Vacuum + RF puede promover el metabolismo de los tejidos, repeler la celulitis, que produce gránulos de grasa en diferentes profundidades y la energía de fusión impactante, y el receptor más profundo puede obtener gránulos en 3CM

de espesor piel, y rápida expansión y la rápida

El calentamiento de la pared celular que excede los límites elásticos y origina células rotas, de modo que la combustión de ácidos grasos al mismo tiempo se separan, no solo el consumo de quema de ácidos grasos sino también el vaciado más directo que reduce rápidamente el tamaño de gránulo.



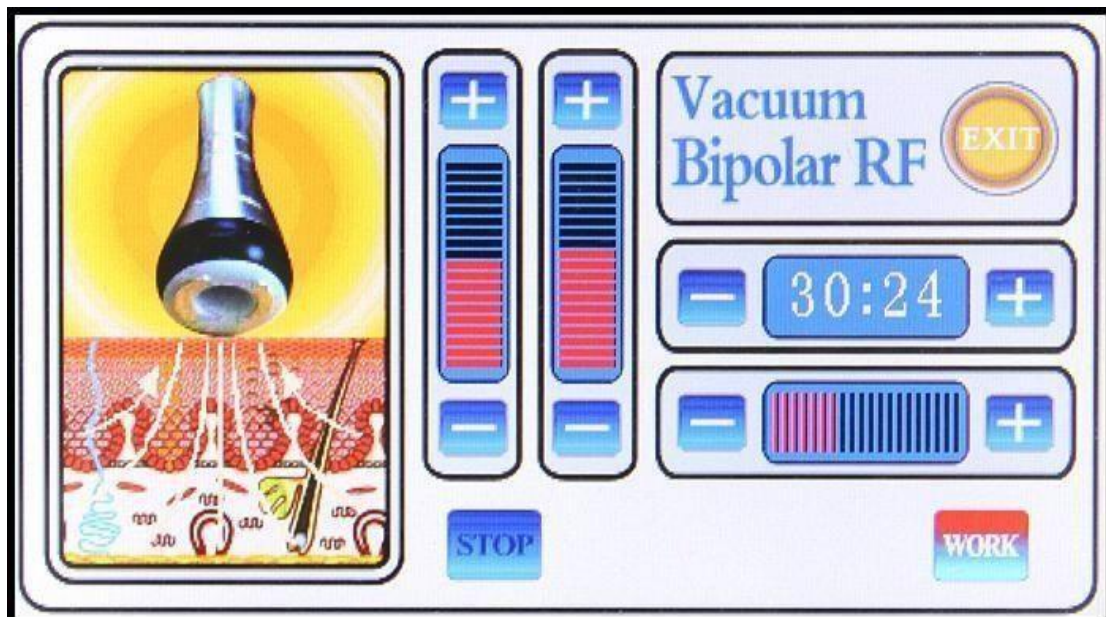

Operation:



Body RF Probe (Vacuum) operation

1. Presione    para ajustar el tiempo.

2. Presione  para incrementar la fuerza de succión o  para disminuirla.

3. Presione  para incrementar la intensidad de RF o  para disminuirla.
4. Presione  para iniciar la operación;
5. Presione  para pausar la operación.

Embellhecimento: use la sonda para masajear la parte específica de la piel de forma circular después de aplicar la crema adelgazante durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Podría acelerar la circulación sanguínea en la parte de la piel tratada y tiene el efecto de descomponer la grasa, etc.

Notas:


1. Aplique una crema adelgazante o un gel refrescante en la parte de la piel a tratar antes del tratamiento.
2. Mantenga un contacto cercano entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.
4. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.




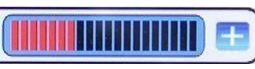



3 RF Tripolar

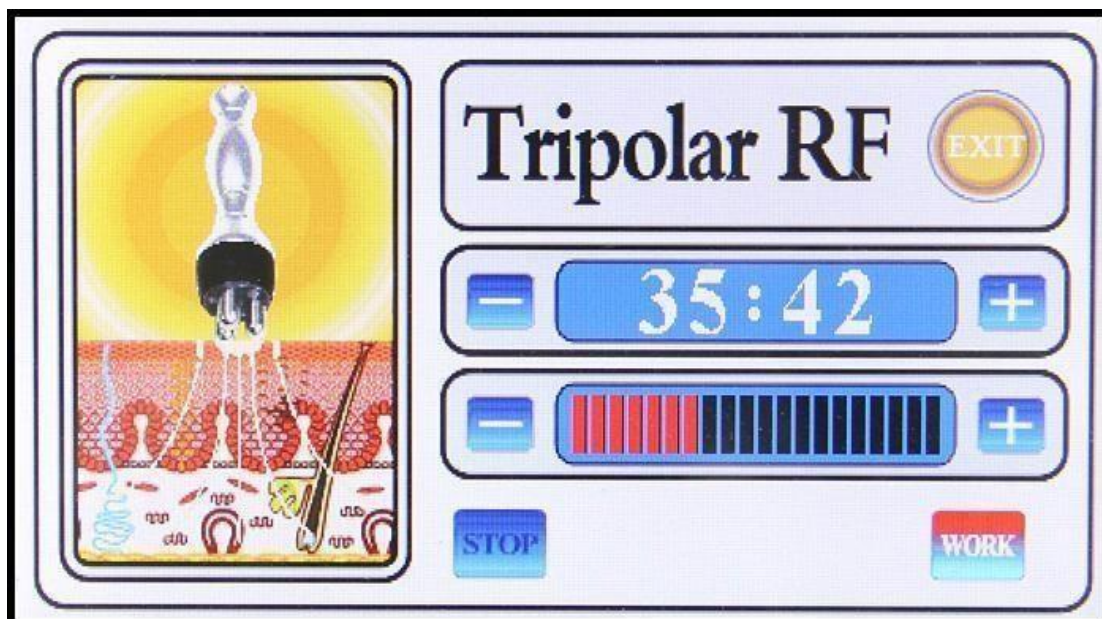

Stick para mejorar el rejuvenecimiento: uso de células de piel de liberación de energía de activación de microcorriente positiva y negativa, de modo que la síntesis pagada de colágeno de fibroblastos, la piel elástica vuelva al compacto original, la piel causa la eliminación de arrugas, previene el envejecimiento de la piel, restaura la elasticidad de la piel, mejora facial.

Operación:



1. Presione    para ajustar el tiempo.
2. Seleccione la fuerza haciendo clic  para incrementar la fuerza o clic  para disminuirla..
3. Presione  para empezar el tratamiento.
4. Presione  para pausar el tratamiento.

4. Cabezal RF Corporal










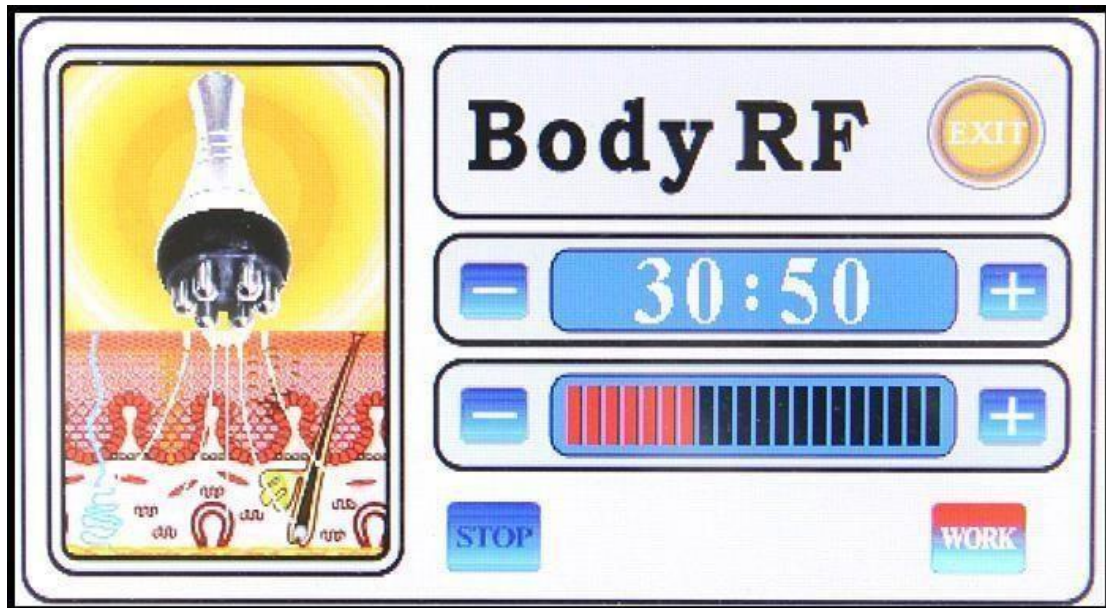


Al estar integrado con la tecnología de radiofrecuencia y la radiofrecuencia más avanzadas, el instrumento puede alcanzar directamente el cuerpo gordo profundamente asentado y tener la excelencia de posicionamiento dirigido de RF. En el estado de actividad rápida, el tejido de las células grasas puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y eliminar el exceso de grasa y toxinas del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, ingrese a la circulación hepática y la linfa y finalmente logre el efecto de disolver la grasa.

Con la tecnología de profundidad controlada, las partículas de diamante con incrustaciones de diferentes tamaños pueden frotar la piel a lo largo de su patrón, ajustar la fuerza de succión mediante aspiración al vacío y frotar con fuerza negativa a presión negativa para explotar directamente la grasa espesa. Por lo tanto, los efectos son muy

obvio: Mejore la circulación sanguínea, acelere la descomposición de la grasa, elimine los desechos, mejore el efecto de eliminar la celulitis, mejore de manera efectiva el estado del tejido de areola, elimine la grasa rebelde y mejore la condición de absorción suficiente de los productos dietéticos.

Operación:



1. Presione    para ajustar el tiempo.
2. Seleccione la fuerza haciendo clic   para incrementar la fuerza o clic   para disminuirla.
3. Presione  para empezar el tratamiento.
4. Presione  para pausar el tratamiento.

1. Eliminación de arrugas faciales, estiramiento y elevación.










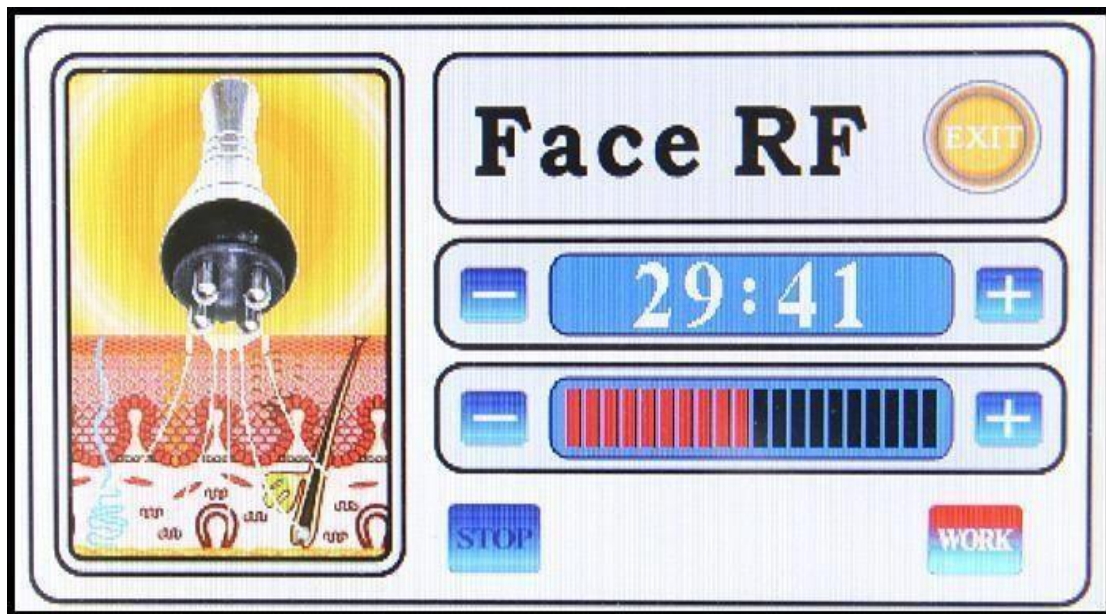


Se utiliza un electrodo de acoplamiento capacitivo para transmitir energía de ondas de radio y generar un campo eléctrico para ingresar al tejido subcutáneo a través de la superficie de la piel. En la alta frecuencia de 450 kHz, este campo eléctrico cambia su polaridad 450,000 veces por segundo. Para responder al cambio rápido en el electrodo, las direcciones de las partículas eléctricas.

La piel también se cambia. En este momento, la resistencia eléctrica natural en el tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Como el colágeno de la dermis papilar puede encogerse inmediatamente cuando la temperatura está dentro del rango de 60 a 70 grados Celsius, después del tratamiento de arrugas, el cliente puede sentir inmediatamente los efectos de estiramiento de la piel a medida que se levanta y se reafirma. Cuando se produce colágeno de forma continua, el grosor y la densidad de

la dermis papilar de la piel se pueden aumentar para eliminar las arrugas, eliminar cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel y hacerla rubia y suave. Mientras se aumenta el colágeno, se genera piel fresca en la posición de operación y se eliminan las arrugas por una gran cantidad de células. Además, cuando se separa la corteza sin elasticidad o con una capa gruesa y córnea en el área con arrugas, la piel circundante también se renovará.

Operación:



1. Presione    para ajustar el tiempo.
2. Seleccione la fuerza haciendo clic   para incrementar la fuerza o clic   para disminuirla.
3. Presione  para empezar el tratamiento.
4. Presione  para pausar el tratamiento.

Instalación



1. Conecte el cable de mango RF bipolar de vacío al primer conector.



2. Conecte el cable del mango RF del cuerpo al segundo conector.



3. Conecte el cable de la cabeza RF facial al tercer conector.



4. Conecte el cable del Ultrasonido 40khz fuerte al cuarto conector.



5. Conecte el cable del cabezal RF tripolar al quinto conector.



6. Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA y encienda el botón rojo.



7. Instale el porta cabezal

Operación de tratamiento

8.1 Facial

Tiempo de tratamiento: 30 minutos

1. Masaje la mandíbula se centra en círculos para producir calor profundo.
2. Masaje la mandíbula inferior en las líneas.
3. Masaje en círculos, en la zona triangular, en ambos lados del rostro.
4. Masaje desde la mandíbula hasta el angulus oris en líneas.



8.2 Muslos


Tiempo de tratamiento: 30 minutos

1. De abajo hacia arriba, empujando hacia la ingle para limpiar la linfa.
2. De abajo hacia arriba, dar vueltas en círculos en el sentido contrario a las manecillas puede ayudar a la descomposición de la grasa.
3. También puede presionar yendo y viniendo para descomponer la grasa.
4. Tire de la rodilla y la textura del músculo a la parte superior, puede mejorar la curva.



Tiempo del tratamiento: 20 a 30 minutos

1. A lo largo de la dirección de la linfa, tirando de la cintura.

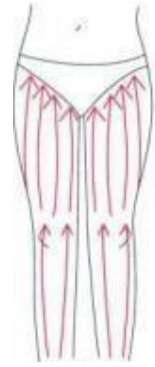

2. Desde arriba hacia abajo, con un gesto contrario a las manecillas del reloj.

3. A lo largo del músculo del muslo, jala hacia arriba para levantar y apretar el músculo.




8.3 Espalda

Tiempo de tratamiento: 20 a 30 minutos


1. Primero de ida y vuelta empujando el nervio de la vejiga de 2 a 3 veces.



2. Masaje en círculos en sentido antihorario para estimular el ganglio linfático debajo del brazo.

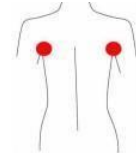

3. En la parte posterior, al girar en sentido antihorario, puede ayudar a descomponer la grasa.

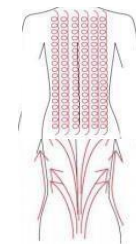


4. Usando drenaje linfático, empuja las toxinas al ganglio linfático, puede ayudar a mejorar la espalda.

8.4 Brazo

Tiempo de tratamiento: 30 minutos


1. Por la parte interna del codo hasta la axila, haciendo drenado linfático.
2. Haciendo círculos hasta el gánglio linfático.
3. En sentido opuesto a las manecillas del reloj, empujando forma de ida y vuelta, descomponiendo la grasa.
4. Desde el codo hasta las axilas, realizando presión.

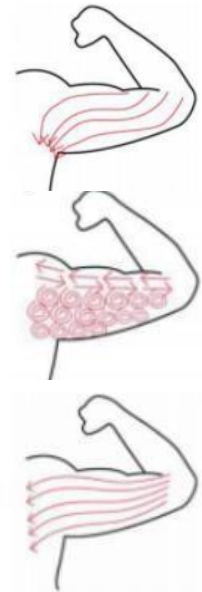

8.5 Abdomen

Treated time: 20~30minutes

1. De pequeño a grande, en sentido de las manecillas, realizando círculos alrededor del ombligo, ayudará peristalsis del intestino grueso.
2. De pequeño a grande, en sentido antihorario, en círculos haciendo presión.
3. Del estómago empuja hacia la ingle.
4. Por medio del drenaje linfático, toma las toxinas hasta la ingle.

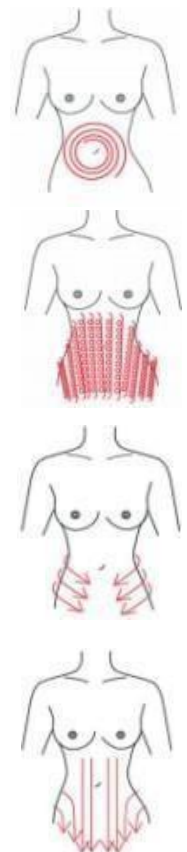

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a a vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención medica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimientos y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios. Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantil