

Bitácora

Modelo: Cavi Wera

Marca: SILUET PERFECT.

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

-5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlos en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que están o sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantil



MS-65T1

Instructions

Estimados usuarios:

Gracias por elegir el producto de nuestra empresa, con el fin de hacer un uso completo de los productos, sugerimos sinceramente seguir:

- ◆◆ Por favor, lea las instrucciones en detalle y consérvelas para seguir leyendo y consultando.
- ◆◆ Por favor, siga las instrucciones para instalar y operar la máquina correctamente.
- ◆◆ Por favor, no retire ni cambie ningún accesorio de la máquina.
- ◆◆ Prohíbe a otros abrir y eliminar el mainframe, excepto las personas autorizadas en la empresa.
- ◆◆ Prohíbe a otros cambiar y mantener la máquina, excepto los profesionales.
- ◆◆ Por favor contáctenos si hay algún problema durante la operación.

Servicio postventa

◆ Ofrecemos garantía de un año. Dentro del período de garantía, todos los cambios o reemplazos debidos a defectos son gratuitos. (El comprador es responsable de los gastos de envío).

Si la máquina está fuera de garantía, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le aseguraremos nuestro mejor servicio todo el tiempo.

¡Este producto no pertenece a la medicina, por favor no lo use para el tratamiento de enfermedades!


Tabla de contenido:

1. Introducción al Manual.....	
1.1 Propósito.....	
1.2 Convenciones.....	
2. Seguridad médica.....	
2.1. Indicaciones para el uso.....	
2.2. Contraindicaciones.....	
2.3. Precauciones.....	
2.4. Seguridad del paciente.....	
3. Características y funciones.....	
3.1. Características.....	
3.2. Funciones.....	
4. Unidad de control y pieza de mano.....	
5. Procedimientos de operación.....	
5.1. Unioisetion Cavitación 40k sonda.....	
5.2. L Cabezal RF Vacuum Corporal.....	
5.3. M Cabezal RF Vacuum frontal.....	
5.4. S RF Vacuum Facial y zona de los ojos.....	
5.5. Cabezal de ultrasonido facial.....	
5.6. Cabezal RF bipolar.....	
5.7. Cabezal frío.....	
6. Paquete incluye.....	
7. Aviso.....	
8. Ilustración de la operación.....	

1. Introducción al manual


1.1 Propósito


Este manual de instrucciones de uso proporciona una descripción de los componentes del sistema, sus controles y pantallas, instrucciones para su funcionamiento y otra información del equipo importante para el usuario.


 Advertencia: No opere esta máquina antes de leer este manual a fondo. Además de este manual, la compañía o su distribuidor local pueden ofrecer capacitación clínica adicional.

Para obtener más información sobre la capacitación disponible, comuníquese con su representante local.

1.2 Convenciones

 Nota: Las notas designan información de especial interés..

 Precaución: las precauciones alertan al usuario sobre los pasos de precaución necesarios para operar correctamente el sistema. El incumplimiento de éstas precauciones puede anular la garantía.

 Advertencia: las advertencias alertan al usuario sobre la información de mayor importancia y vital para la seguridad del paciente y del usuario.

Todos los procedimientos se desglosan por pasos numerados. Los pasos deben completarse en la secuencia en que se presentan.

Las listas con viñetas indican información general sobre una función o un procedimiento en particular. No implican un procedimiento secuencial.

Los nombres de los controles se escriben tal como están en el sistema y aparecen en texto en negrita.

2. Seguridad médica

2.1. Indicaciones para el uso

La máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación está indicada para su uso como un tratamiento estético dermatológico no invasivo para:

- Adelgazante, escultura corporal.
- Cuidado facial, lifting, blanqueamiento.
- Estiramiento de la piel del cuello

2.2. Contraindicaciones

La máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación está contraindicada para su uso en pacientes con:

- Heridas abiertas o lesiones en la cara y / o cuello.
- Acné severo o quístico en la cara y / o cuello

2.3. Precauciones

La máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación no ha sido evaluada para su uso sobre varios materiales. Por lo tanto, el tratamiento no se recomienda directamente sobre esas áreas con cualquiera de los siguientes:

- Implantes mecánicos
- Rellenos dérmicos
- Dispositivos eléctricos implantados en la cara y / o cuello.
- Stents metálicos en la cara y / o cuello.

La energía de tratamiento no se recomienda para uso directo en un queloide existente.

La máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación no se ha evaluado para su uso en pacientes con un plan de tratamiento anticoagulante

Se recomienda evitar las siguientes áreas durante el tratamiento:

- Glándula tiroides, cartílago tiroides y tráquea.
- Arterias

La máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación no se ha evaluado para su uso en las siguientes poblaciones de pacientes:

- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Niños

Aquellos con los siguientes estados de enfermedad:

- Un trastorno hemorrágico o disfunción hemostática.
- Una enfermedad cutánea sistémica o local activa que puede alterar la cicatrización de la herida.
- Herpes Simple
- Enfermedad autoinmune
- Diabetes
- Parálisis de bell

2.4. Seguridad del paciente



Advertencia: la máquina de fotones de micro corriente RF de vacío de cavitación no debe utilizarse en los ojos de un paciente o en un lugar o técnica donde la energía de ultrasonido pueda alcanzar el ojo.



Advertencia: use este sistema solo si está capacitado y calificado para hacerlo.



Advertencia: Si ocurre algún problema durante la operación del sistema, pregunte de inmediato.

Acción (s): levante el transductor de la piel de la paciente, presione el botón DETENER para detener completamente la operación del sistema.

3. Características y Funciones

3.1 Características

Tratamiento indoloro enfoca la energía de RF en la posición correcta, en comparación con otros

Tecnología de radiofrecuencia. Utiliza baja energía y alta frecuencia, segura y eficaz.

Apunte a la superficie de la piel y la ubicación profunda, utilizando un método complejo para controlar las diferentes corrientes y la energía, acceda directamente a las diferentes capas de la piel. No provoca el fenómeno de la piel desigual.

Dirigiéndose selectivamente al tejido graso, para evitar calentar otras grasas, para lograr el efecto de tratamiento más rápido.

Todo el proceso se completa sin la necesidad de cirugía y anestesia.

Con el sistema de cavitación ultrasónico 40KHZ más útil.

Sin efectos secundarios y el riesgo de recuperar el peso, los resultados son bastante obvios. No afecta el trabajo normal y la vida.

3.2 Funciones

Reafirmación de brazos, piernas, muslos, glúteos, cintura, espalda, músculos abdominales y remodelación.

La figura del cuerpo Mejora y trata la piel de naranja como los tejidos grasos de diferentes.

Niveles graves Con los efectos del alivio calmante, la descompresión y el dolor (como dolor en las articulaciones, ciática), promueve el ejercicio aeróbico mecánico regular del tejido de la piel, alivia rápidamente el estrés y elimina la fatiga. Reafirmante, lifting y compacto de la piel y.

Moldea la forma de la cara circular y activa las células, promueve el metabolismo y de modo que

Se puede obtener un 100% más de colágeno y fibras elásticas para mejorar el tratamiento facial y piel del cuerpo

4. Unidad de control y pieza de mano



- A. filtro
- B. conector vacuum
- C. conector Unoisetion cavitación
- D. conector cabezal frío
- E. conector cabezal ultrasonido
- F. conector RF bipolar
- G. Botón de prueba de vacuum
- H. Botón de encendido y apagado
- I. Conector de corriente



Filtro y fusible de repuesto



L&M&S cabezales de Vacuum



Unoisetion cabezal cavitación



Cabezal frío



Cabezal de ultra sonido facial





Cabezal de RF facial


5. Procedimientos de operación:

Presiona el botón de encendido / apagado, luego aparece la bienvenida.

Interfaz primero, luego al menú principal de funciones.

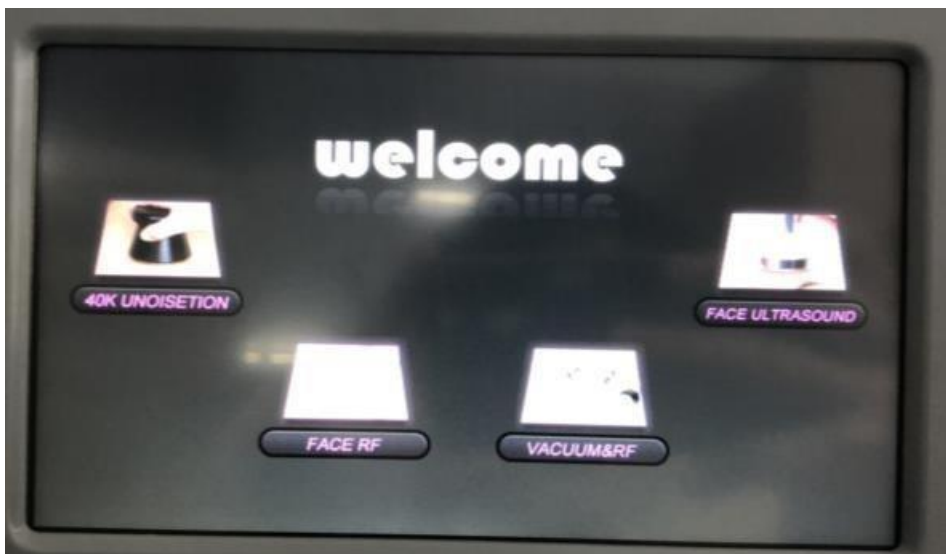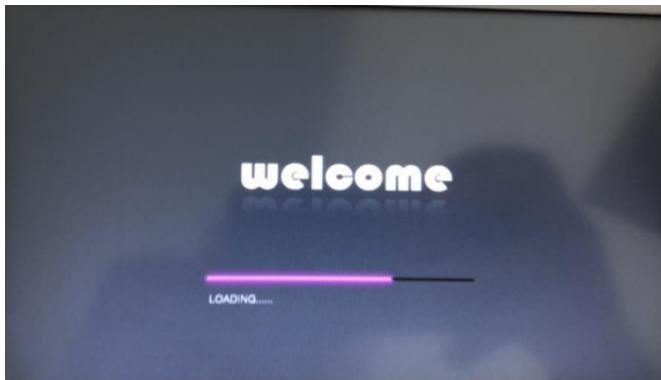


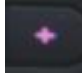
5.1 Cavitación 40k

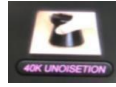


Seleccione la función , después aparecerá la siguiente interfaz:





Presione  para ajustar el tiempo de trabajo.


Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.


Presione  para seleccionar el modelo.

Modelo A:  Onda continua, para el área de grasa delgada;

Modelo B:  Onda discontinua, para área con grasa gruesa.

Presione  para iniciar o pausar la operación.

Presione  para restablecer las configuraciones.

Presione  para volver al menú principal.

Utilizar la cavitación 40Khz por 15-20 minutos.




Advertencia:

Se prohíbe el uso del cabezal de Cavitación de 40Khz en tratamientos de espalda o rostro.


5.2 L Cabezal RF Vacuum corporal


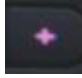
Conecte primero el cabezal de RF Vacuum que necesita, luego presione la función de rf de vacío en la pantalla. Si no conecta el cabezal primero, no puede elegir la función.



Seleccione la función , después aparecerá la siguiente interfáz:




Presione  para ajustar el tiempo de trabajo


Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.


Presione  para ajustar el tiempo de succión.


Presione  para ajustar el tiempo de liberación.


 Nota: El tiempo de succión debe ser un poco más largo que el tiempo de liberación.



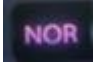

También puede pulsar  Elegir el modelo de operación directamente. Entonces no necesitas ajustar el tiempo de succión y liberación.

Presione , La temperatura de RF estará arriba de la que configuraste en este momento.

Presione , La temperatura de RF aumentará la que usted establezca gradualmente.

Presione  para iniciar o pausar la operación.

Presione  para restablecer las configuraciones.

Presione  para volver al menú principal.

Advertencia:



Aplique suficiente crema adelgazante en el área de tratamiento.

Manténgase en contacto total con la piel durante el tratamiento, mueva la sonda en la superficie del área cuidada, de manera uniforme y completa.


Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.

15-20 minutos en cada área de tratamiento recomendada


5.3 M Cabezal RF Vacuum frontal


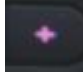
Conecte primero el cabezal de RF Vacuum que necesita, luego presione la función de rf de vacío en la pantalla. Si no conecta el cabezal primero, no puede elegir la función.




Seleccione la función , después aparecerá la siguiente interfaz:




Presione  para ajustar el tiempo de trabajo


Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.


Presione  para ajustar el tiempo de succión.


Presione  para ajustar el tiempo de liberación.


 Nota: El tiempo de succión debe ser un poco más largo que el tiempo de liberación.



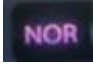

También puede pulsar  Elegir el modelo de operación directamente. Entonces no necesitas ajustar el tiempo de succión y liberación.

Presione , La temperatura de RF estará arriba de la que configuraste en este momento.

Presione , La temperatura de RF aumentará la que usted establezca gradualmente.

Presione  para iniciar o pausar la operación.

Presione  para restablecer las configuraciones.

Presione  para volver al menú principal.

Advertencia:



Aplique suficiente crema adelgazante en el área de tratamiento.

Manténgase en contacto total con la piel durante el tratamiento, mueva la sonda en la superficie del área cuidada, de manera uniforme y completa.


Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.

15-20 minutos en cada área de tratamiento recomendada


5.4 S size vacuum RF face and eyes around probe



Conecte primero el cabezal de RF Vacuum que necesita, luego presione la función de rf de vacío en la pantalla. Si no conecta el cabezal primero, no puede elegir la función.




Seleccione la función , después aparecerá la siguiente interfaz:




Presione  para ajustar el tiempo de trabajo

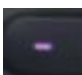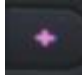
Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.


Presione  para ajustar el tiempo de succión.


Presione  para ajustar el tiempo de liberación.


 Nota: El tiempo de succión debe ser un poco más largo que el tiempo de liberación.




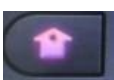
También puede pulsar  Elegir el modelo de operación directamente. Entonces no necesitas ajustar el tiempo de succión y liberación.

Presione , La temperatura de RF estará arriba de la que configuraste en este momento.

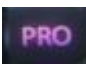Presione , La temperatura de RF aumentará la que usted establezca gradualmente.

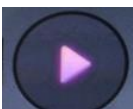Presione  para iniciar o pausar la operación.

Presione  para restablecer las configuraciones.

Presione  para volver al menú principal.

Advertencia:




Aplique suficiente crema adelgazante en el área de tratamiento.


Manténgase en contacto total con la piel durante el tratamiento, mueva la sonda en la superficie del área cuidada, de manera uniforme y completa.


Ajuste la intensidad de nivel bajo a nivel alto.


15-20 minutos en cada área de tratamiento recomendada



5.5 Face Ultrasound probe

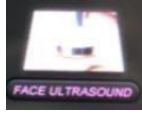

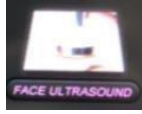
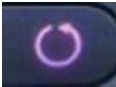
Choose the function , then it will come to the following interface:

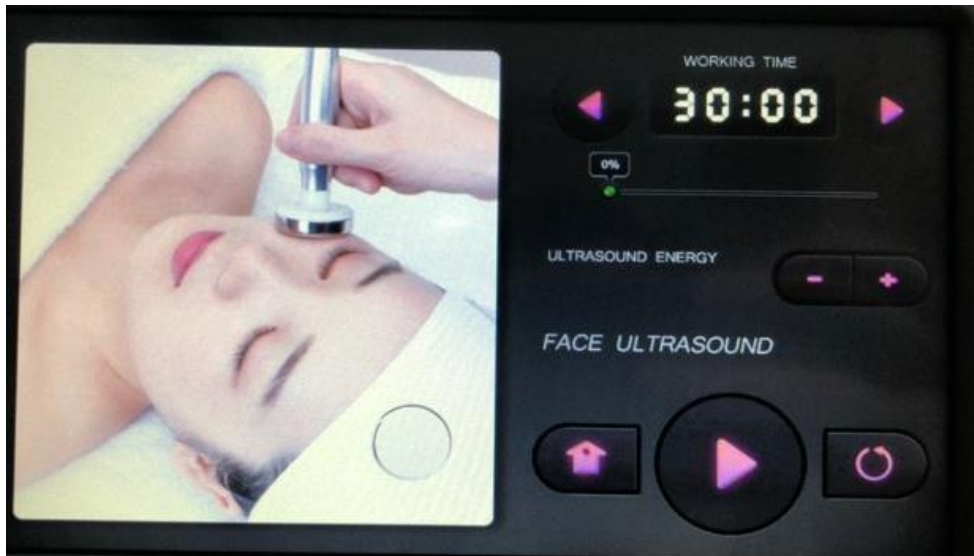


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo

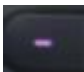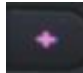Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.


Presione  para iniciar o pausar la operación.


Presione  para restablecer las configuraciones.


Presione  para volver al menú principal.


5.6 Face bipolar rf probe


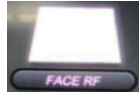


Choose the function , then it will come to the following interface:

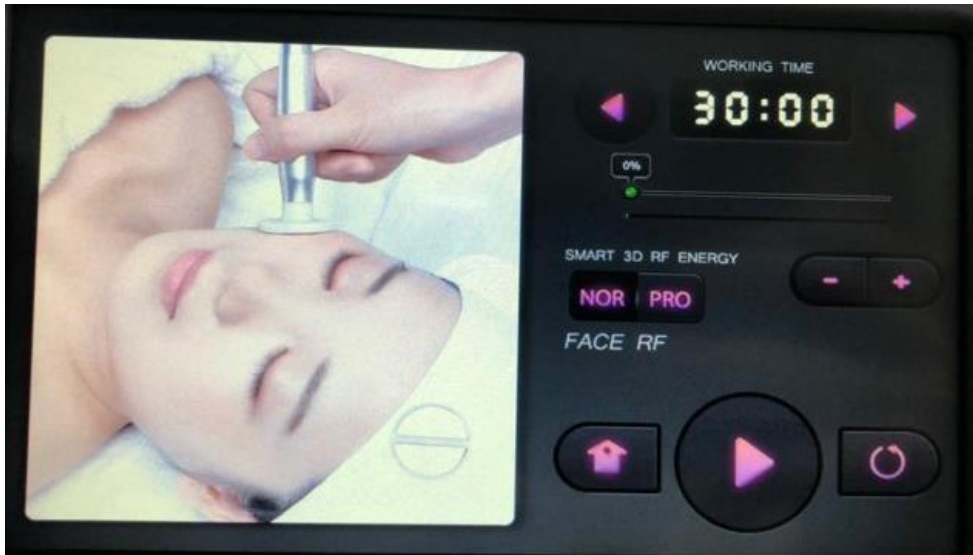


Presione  para ajustar el tiempo de trabajo

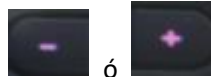

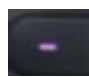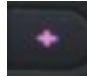
Presione  ó  para disminuir o incrementar la energía. Nivel puede ser ajustado de 0%~100%.

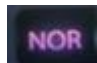


Press , the RF temperature will be up the one you set right now.




Press , the RF temperature will be up the one you set gradually.




Presione  para iniciar o pausar la operación.



Presione  para restablecer las configuraciones.

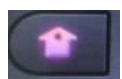

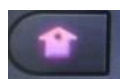Presione  para volver al menú principal.

5.7 Cabezal frío (calmando la piel y reduciendo los poros)

La temperatura de la piel aumentará después del tratamiento de la sonda de cavitación, la sonda de vacío y las sondas de RF. Luego use la sonda fría, esto ayuda a calmar la piel y reducir los poros.



Presione el botón rojo de encendido / apagado de la sonda para iniciar / pausar la sonda, trabajando de 5 a 10 minutos.

6. Package Including

2 x host

1 x Unoisetion Cavitación 40k sonda

1 x L Cabezal RF Vacuum Corporal

1 x M Cabezal RF Vacuum para rostro

1 x RF Vacuum Facial y zona de los ojos

1 x Cabezal de ultrasonido facial

1 x Cabezal RF bipolar


1 x Cabezal frío

1 x Cable de fuente de alimentación (están disponibles versiones de voltaje de 110v y 220v (frecuencia: 50 / 60Hz). También disponemos de un enchufe de EE. UU., Reino Unido, AU, UE para adaptarse al país de todo el mundo).

7. Notice

1. Inserte el filtro de vacío en la parte posterior de la máquina antes de cambiar la máquina.

Asegúrese de que el filtro de vacío en las siguientes condiciones

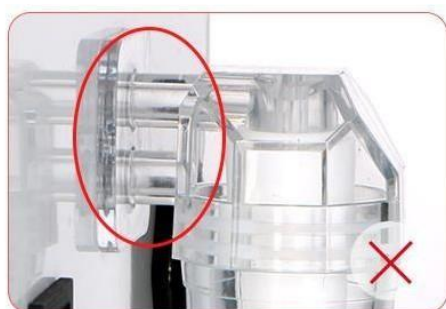

Note: Por favor, inserte este filtro lo más profundo posible hasta que no pueda insertarse. Si el filtro no se insertó completamente, la vacuum no tendrá la succión.

1. Si la succión de vacío es débil, ajuste la perilla de ajuste: Rotación en el sentido de las agujas del reloj: Min a Max.



8. Notice



1. Cuello

Muévase con movimientos circulares pequeños desde el interior del cuello hacia afuera, luego levántelo desde el cuello hacia arriba hasta la mejilla, el área de tratamiento del cuello se puede dividir en tres líneas (arriba, media, abajo) para operar
Atención: la fuerza debe ser más pesada y más liviana, los electrodos de operación deben estar en la piel, repita de 8 a 10 veces.



2. Barbilla

Haga que el cabezal de operación se mueva en pequeños movimientos circulares presionando firmemente contra la barbilla doble y luego tire hacia atrás hacia la parte posterior de la oreja, repita 5-8 veces




Haga que el cabezal de la operación se mueva en pequeños movimientos circulares aferrándose a la barbilla hasta los inicos de la oreja. Luego, jale la barbilla hacia abajo con fuerza ligera, repita 5-8 veces



3. Boca

Haga que la cabeza de la operación se mueva en un pequeño movimiento circular al aferrarse a la esquina de la boca, y rodee las cuentas de las orejas, luego tire hacia abajo con ligera fuerza hacia la barbilla, repita 5-8 veces

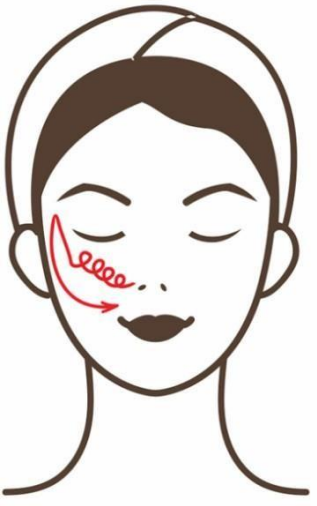


4. mejilla

Haga que la cabeza de la operación se mueva en un pequeño movimiento circular cerrando el hueso claro de la nariz, formando un círculo hacia las perlas. Luego, bájelo hacia la barbilla con una fuerza ligera, repita 5-8 veces.



5. Forehead

Haga que el cabezal de la operación se mueva en un movimiento circular pequeño, cerrando el hueso claro de la nariz y haga un círculo hacia las orejas. Luego, bájelo hacia la barbilla con una fuerza ligera, repita 5-8 veces.

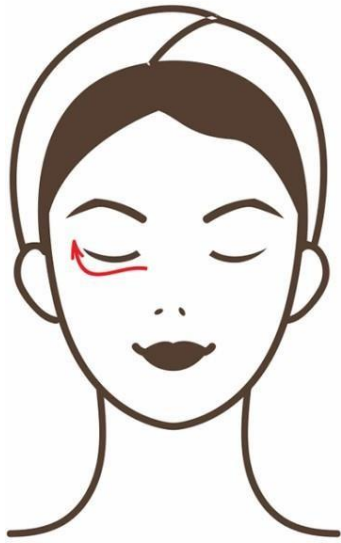

6.Zona aledaña a los ojos

Dragar el meridiano y las colaterales de los ojos, repetir 5-8 veces




Muévase con movimientos circulares pequeños en el ojo inferior y luego levante hacia la sien, repita 5-8 veces



Muévase en un pequeño movimiento circular desde la esquina del ojo hasta los puntos de Jingming y la ceja, repita 5-8 veces.

Vientre

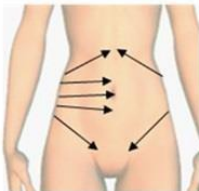

1. Muévase lentamente desde la cintura hasta el final de la ingle, repita 3 veces
2. Muévase lentamente desde la parte inferior de la cintura hasta el abdomen, a lo largo del espacio de las costillas, repita 3 veces
- 3 Muévase lentamente desde la cintura hasta la línea del ombligo, repita 3 veces




4. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el grosor de la grasa del cuerpo, cada uno en 10 círculos
5. Mejorar la anticelulitis y el crecimiento de colágeno, apretar la piel



6. De pequeño a grande en sentido horario, recorre el ombligo, promueve la peristalsis intestinal y mejora el estreñimiento.

Cintura

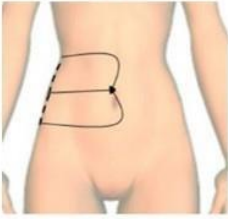

1. Empujar la grasa hacia adelante y hacia atrás en cada cintura lateral (descompensar eficazmente la celulitis y la cintura contraria) repetir 10 veces



2. Mueve 10 círculos en la región renal.

3. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el grosor de grasa de la nalga, cada uno en 10 círculos

4. Mueve y escribe "8" en dos lados de la cintura (repite 10 veces)



Recueste al paciente de lado


5. Pase del grosor de la grasa de la nalga a la ingle, repita 8-10 veces

6. Muévase lentamente desde el grosor de la grasa de la nalga cerca de la fosa axilar, repita 8-10 veces

Muslos



1. Muévase una vez lentamente de la rodilla a la ingle, línea por línea.

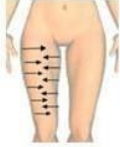

2. Muévase en horizontal desde el interior de la pierna hacia la mitad, hacia abajo hacia arriba, más lento el movimiento, repita 2 veces.

3. Muévase en horizontal desde el exterior de la pierna hasta la mitad, hacia abajo, hacia arriba, más lento el movimiento, repita 2 veces

Precaución: baje el nivel de energía 1-3 cuando realice el trazado dentro de la pierna



4. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el grosor de la grasa del cuerpo, cada uno en 10 círculos (Mejore la anticelulitis y el crecimiento de colágeno, piel firme)



5. En la parte interior de la pierna, mueva a lo largo de la textura muscular desde la rodilla hasta la entrepierna, repita el movimiento de ida y vuelta en 4 veces

6. En la parte exterior de la pierna, mueva a lo largo de la textura muscular desde la rodilla hasta la entrepierna, repita el movimiento de ida y vuelta en 4 veces



7. Muévase de la rodilla a la ingle, repita 8 veces.

Pantorrilla



1. Muévase lentamente desde el fondo del pilar a la fosa poplítea, repita 3 veces



2. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el cuerpo grueso de la grasa, cada uno en 10 círculos




3. Empuje desde arriba de la fosa poplítea desde la raíz de la pantorrilla, repita 5 veces.

Muslos parte posterior



1. Empuje la parte inferior de los glúteos de abajo hacia arriba desde la fosa poplítea, línea por línea, repita una vez cada una.

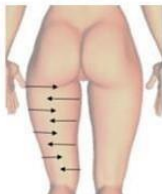


2. Muévase en horizontal desde el interior de apretado al medio, de abajo hacia arriba, más lento el movimiento, repita 2 veces.

3. Muévase en horizontal desde la parte exterior del muslo hacia la mitad, de abajo hacia arriba, más lento el movimiento, repita 2 veces.
Precaución: baje el nivel de energía 1-3 al tratar el interior del muslo.




4. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el grosor de la grasa del cuerpo, cada uno en 10 círculos (Mejora la anticelulitis y el crecimiento de colágeno, piel firme)

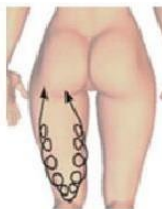

5. En el interior de la pierna, mueva a lo largo de la textura muscular desde la rodilla hasta la parte inferior de los glúteos, repita el movimiento hacia adelante y hacia atrás en 4 veces.


6. En la parte exterior de la pierna, mueva a lo largo de la textura muscular desde la rodilla hasta la parte inferior de los glúteos, repita el movimiento de ida y vuelta en 4 veces. Empuje hacia arriba el punto de ocho liao desde arriba de la línea rápida de la rodilla por la línea, repita 8 veces

Espalda

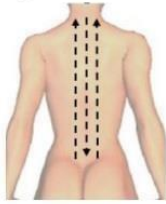


1. Desde el punto de Da Zhui hasta el recipiente del gobernador, el punto de ocho liao, la vejiga urinaria y hasta el punto de Da Zhui, deslice hacia el punto de Da Zhui desde el recipiente del gobernador.

Precaución: repita el movimiento 3 veces en la vejiga urinaria de cada lado después del vaso del gobernador

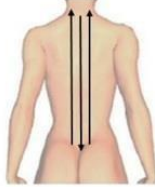


2. Desde el punto de Da Zhui hasta el barco del gobernador, el punto de ocho liao, la vejiga urinaria y el punto de Da Zhui hacia arriba, luego deslice hacia el punto de Da Zhui desde el recipiente del gobernador.

Precaución: Repita el movimiento 3 veces en la vejiga urinaria de cada lado después del vaso del regulador.

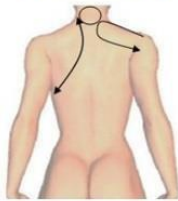

3. Muévase con un pequeño movimiento circular en el punto Da Zhui, luego vaya al masaje daban point en un movimiento circular, repita 2 veces de izquierda a derecha

Precaución: Muévete 5 veces sobre las costuras de la escápula.

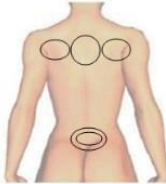

4. Después de jugar cinco círculos en el área cardiopulmonar, se deben jugar cinco círculos en el área cardiopulmonar.



5. Mueva en un círculo pequeño de abajo hacia arriba, de arriba a abajo, repita 6 veces, un lado terminado, el otro lado comienza.




6. Mueva y escriba "8" en dos lados de la cintura, hacia atrás, repita 6 veces



7. Muévase desde arriba de la nalga a la axila hasta que los dos lados terminen, repita 3 veces.

Brazos

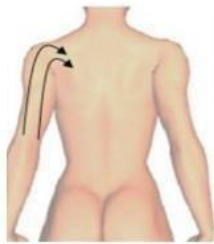

1. Muévase desde la parte externa del brazo a la axila, de abajo a arriba, más lento al mover, repita 2 veces



2. Muévase por separado en pequeños movimientos circulares en el grosor de la grasa del cuerpo, cada uno en 10 círculos (Mejore la anticelulitis y el crecimiento de colágeno, piel tensa)



3. Muévase desde la parte superior externa del brazo al codo, luego suba la axila por los dos lados y luego hacia abajo, repita 6 veces.

Brazos



4. Desde la parte superior del codo hasta la axila que está cerca de la espalda.



5. Muévase desde el interior del codo a la axila, de abajo a arriba, rápido al movimiento, repita 2 veces

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.