

Modelo: CEPILLO BRUSH

Marca: SILUET PERFECT

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales :

-5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

MANUAL DE USO



Introducción

Este es un instrumento portátil de belleza cuidado de la cara de cepillo giratorio para casa o para uso personal. Es adecuado para todo tipo de pieles.

La máquina rotativa Cepillo Facial funciones principales:

1. Micro-masaje
2. Cara limpia
3. La piel Scrub



¿Qué es el cepillo giratorio?

Mediante el uso de cepillos para limpiar la piel, el cepillo circunscribe enfoque automáticamente cuando la piel y limpiar la grasa, cabeza negra, restos de maquillaje y suciedad.

El propósito de la máquina de cepillo facial es muda fuera de las células muertas (exfoliar y eliminar la suciedad y mugre que se aferra a la superficie de la piel. Antes de cualquier procedimiento de cepillado de la piel debe ser limpiado. La cara se vaporiza o al vapor con toallas calientes para suavizar la superficie de células muertas para que puedan ser más fáciles de retirar. Es importante utilizar el cepillo giratorio antes de comenzar el tratamiento posterior.

Operación:

1. Enchufe el cepillo en el titular.
2. Connet fuente de alimentación, pulsar la tecla " Power" clave, ver el poder indicar la luz, a continuación, pulse "Intensidad+" para arrancar y acelerar la velocidad de rotación. Pulse "Intensidad" para reducir la velocidad de rotación o pausar el trabajo. Pulse el botón "izquierda" o "HACIA LA IZQUIERDA" para elegir el sentido de rotación.
3. Pulse el botón "POWER" clave para detener cuando termine.

Función principal

1. Suavemente la cara y cuerpo Microdermoabrasión Limpieza: eliminar células muertas de la superficie cutánea
2. Mejorar la absorción de productos de cuidado de piel
3. Mejorar la circulación sanguínea
4. Textura de piel suave, piel actualizar
5. Apto para uso diario
6. Más fácil de aplicar el maquillaje (Fundación ...) en la piel para lograr la naturaleza y suave textura de piel

Características de nuestro producto

1. Suave y adecuado para todo tipo de piel.
2. Simula la circulación sanguínea y el metabolismo celular
3. Brush gira en ambas direcciones a la izquierda y derecha
4. Prepara la piel para absorber mejor los productos de cuidado de piel
5. profunda exfoliates y limpia la piel

Especificación:

La entrada :cambio automático de 100-240 V 50/60 Hz

Salida:24V DC 500mA

Alimentación:20W

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos

Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecendescritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.