

MANUAL DE USUARIO: CRYO PAPADA

MARCA: SILUET PERFECT.



Advertencia

Estimados usuarios:

Gracias por elegir el producto de nuestra empresa, para hacer un uso completo del Productos, sugerimos sinceramente seguir:

- ◆ ◆ Por favor, lea las instrucciones en detalle y guárdelas para seguir leyendo y consultarte.
- ◆◆ Por favor, siga las instrucciones para instalar y operar la máquina correctamente.
- ◆◆ Por favor, no retire ni cambie ningún accesorio de la máquina.
- ◆ ◆ Prohíbe a otros abrir y eliminar el mainframe, excepto el Personas autorizadas en la empresa.
- ◆ ◆ Prohíbe a otros cambiar y mantener la máquina, excepto el personal profesional.
- ◆◆ Por favor, póngase en contacto con nosotros si hay algún problema durante la operación.

Servicio postventa

◆ Ofrecemos garantía de un año. Dentro del período de garantía, todos los cambios o Los reemplazos por defectos son gratuitos. (El comprador es responsable de los gastos de envío). Si la máquina está fuera de garantía, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

¡Este producto no pertenece a la medicina, no lo utilice para el tratamiento de enfermedades!

Lea atentamente las NOTAS antes de utilizar la máquina.

1. Asegúrese de que el tanque esté lleno de agua antes de encender la máquina.
2. Por favor, coloque al menos dos piezas de membranas en el área de tratamiento antes de comenzar el tratamiento.
3. Limpie el filtro a tiempo .De lo contrario, se verterá el líquido residual.En la máquina y quemará partes.
4. Recomendamos que cada área de tiempo de tratamiento no supere los 30 minutos. Durante los 30 minutos, por favor no permita que los clientes se queden solos, es necesario verificar la situación del cliente a tiempo.
5. Durante el tratamiento, verifique la condición de la piel cada cinco minutos.
6. Si no puede sentir frío en un minuto, deténgase y verifique el estado de la máquina.
5. Cambie el agua una vez al día.
6. Los pacientes que usan el siguiente equipo médico eléctrico no pueden usar el equipo.

Marcapasos cardíacos implantados u otros dispositivos electrónicos implantados;

Máquinas artificiales de corazón-pulmón para sostener la vida y otros equipos;

Equipos de medición de ECG portátiles;

Los siguientes pacientes deben ser acordados por los médicos profesionales antes de usar el equipo.

Pacientes con aguda

Malignidad

Pacientes con infecciosos

Periodo menstrual mujer

Mujeres embarazadas

Pacientes con corazón

Pacientes con fiebre

Los pacientes están recibiendo operación o aquellos con fenómeno corporal anormal

Aviso de seguridad

1. No desarme el equipo ni intente realizar alguna otra operación, que No se ha indicado en nuestras instrucciones. Todo el trabajo de reparación debe ser realizado por nuestro personal profesional admitido
2. No ensamble ni opere este equipo mientras esté cerca del agua o tus manos están mojadas. Tenga en cuenta que no vierta el líquido en él.
3. Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando cumpla con las condiciones que se detallan a continuación.
Y en contacto con la estación de mantenimiento profesional.
 - a. El equipo tocó líquido.
 - b. El equipo tiene olor anormal, humo o ruidos fuertes y fuertes.
 - c. Cable roto
 - re. El equipo está caído y roto.
4. No coloque nada sobre los cables, no coloque el equipo en ningún lugar Donde alguien puede pisar el cable.
5. Saque el cable de alimentación después de usarlo por su seguridad.
6. No ponga nada en el enchufe del equipo, de lo contrario podría provocar un incendio o tocar la electricidad. Si algo entra en el equipo, no lo saque solo, contacte al distribuidor o nuestra empresa inmediatamente.
7. Por favor, no coloque el equipo sobre cualquier cosa que no pueda mantenerse firme, evítelo. Vueltas y daños.
8. Nuestra compañía tiene el derecho de modificar la información en esta introducción

Aviso de Operación

Antes de la operación, lea el siguiente contenido.

1. Es esencial realizar diferentes ajustes según la demanda de tratamiento específico.
2. La aplicación de La máquina nunca debe ser dolorosa y causar enrojecimiento a la Piel o dejar marcas.
3. No aplique el dispositivo a niños menores de 7 años. El tratamiento para Los niños mayores de 7 años requieren consejo médico.
4. No utilice este dispositivo si padece fiebre, inflamación, dermatitis (acné, eccema, herpes), verrugas, heridas abiertas o recientemente cosidas, graves y progresivas enfermedades (cáncer, SIDA, hepatitis, enfermedades de la sangre, etc. o problemas de coagulación de la sangre).
No aplique el dispositivo si tiene o ha tenido flebitis, después de la cirugía de venas dentro de los últimos dos meses, si tiene venas varicosas u hormigueo en las extremidades, si tiene Cualquier duda consulte a un médico.
5. Nunca utilice el dispositivo en una mujer embarazada.
6. La máquina podría usarse en todas las áreas externas y sanas del cuerpo, excepto Los ojos, garganta, orejas, glotis y el área genital.
7. No debe aplicarse dentro de la boca, ni en la membrana mucosa ni en los pezones, o Lunares sin consejo médico.
8. Nunca uses el dispositivo si sufres de epilepsia. El dispositivo no debe ser utilizado por

Cualquier persona que padezca una enfermedad mental.

9. En el caso de tratamiento a largo plazo con medicamentos como la anti inflamación, Anticoagulantes, antibióticos o si su piel se hiere al menor impacto, pida consejo a Su médico / médico antes de usar.

10. Nunca aplique a las partes del cuerpo con joyas o anillos.

11. El uso regular de la máquina mejora el bienestar; Es mejor no dejar de usarlo.

Por un período prolongado de tiempo. No seguir instrucciones de uso y uso.

Las recomendaciones pueden traer menos resultados de lo esperado. No utilizar el dispositivo más largo que el tiempo recomendado

12. Si sus síntomas no mejoran, o si tiene alguna duda sobre el uso, consulte tu doctor.

13. El efecto puede variar según su edad, hábitos de vida (nivel de actividad física, dieta, etc.).

14. La máquina se puede usar después de cualquier cirugía plástica solo mientras se sigue la Instrucción del cirujano.

15. El tiempo de trabajo continuo de la Máquina no debe exceder de 1 hora. La mejor manera es desconecte la alimentación, deje que la máquina descanse durante 20-30 minutos. Después de que la máquina tenga

Trabajó durante una hora.

16. Nunca use ácido fuerte o de base fuerte o alcohol para limpiar la máquina. (utilizar Solución salina fisiológica para limpiar la máquina.

Sistema de extracción de barbilla en U

La congelación de grasa es un procedimiento no invasivo que elimina de manera suave y efectiva la grasa del objetivo. Áreas del cuerpo que no han respondido a la dieta tradicional y al ejercicio. Los pacientes pueden beneficiarse de resultados notables pero de apariencia natural en sus áreas problemáticas, lo que proporciona una apariencia más suave del contorno del cuerpo.

La congelación de grasas es más efectiva para eliminarla grasa del abdomen, los mangos de amor (flancos) y la espalda.

Los resultados del procedimiento de congelación de grasas se logran utilizando la avanzada tecnología de congelación de grasa.

que enfría el tejido específico para descomponer las células de grasa para una fácil extracción, sin ningún daño para El tejido circundante. Se ha comprobado que las células grasas son más vulnerables al frío que las del tejido circundante. Esto estimula un proceso de eliminación de grasa natural que continúa por varios meses después del procedimiento.

Lista de paquetes

1 x máquina principal de congelación de grasa

1 x mango en forma de U

1 x soporte de la manija

1 x filtro

1 x línea eléctrica

Vista frontal de la máquina



- A: 7" pantalla táctil a color
- B: mango U-Shape
- C: soporte de mango en forma de U
- D: ventilador de la máquina

Vista posterior de la máquina





¿Cómo añadir agua (solo agua purificada / destilada)?

1. Pon el embudo en el orificio de entrada.
2. Saque la goma del orificio medio (Desbordamiento)
3. Entrada de agua con tubo.
4. Ingrese agua hasta que salga agua por el orificio de desbordamiento, eso significa que máquina ya está llena de agua
5. Vuelve a poner la goma y saca el embudo.
6. El orificio de salida es para extraer el agua, cuando se desea cambiar Agua, ponga el embudo en este agujero, entonces el agua saldrá directamente..

AVISO: Cuando reciba la máquina, debe agregar el agua , luego comenzar laCada semana se debe agregar un poco de agua, cada mes debe agotarse. y agregue nuevamente el relleno. Fuente de agua: agua pura o agua destilada. Cuando se trata Cryolipolysis, el mejor ajuste de temperatura: -5- 5°C. Durante el tratamiento, por favor preste Atención y pregunte como se siente el cliente. Si el paciente se siente demasiado frío o incómodo, por favor pare la máquina

Operacion

Después de que esté lleno de agua destilada / purificada, coloque la línea de alimentación, luego gire la llave cambie para encender la máquina, y la pantalla le mostrará "Bienvenido" y cargando página



Página de operación principal



Sistema de alarma de temperatura automático

La máquina dejará de funcionar automáticamente para proteger a la persona durante el tratamiento si la temperatura alcanza hasta 40 ° C



Con sistema de indicación inteligente.

El icono de agua estará oscuro una vez que el sistema de circulación de agua indique error. Obtenga la información de la circulación del agua, así como la máquina dejará de funcionar automáticamente.



.configurar el tiempo de operación (0~ 30 minutos), de acuerdo con la necesidad del cliente



configure la temperatura (-10 ~ 5 ° C), analice el Estado de la parte grasa, entonces de acuerdo a ella, para ajustar la temperatura



Empezar / pausar tratamiento



Restablecer parámetros



Volver a la pagina principal

Operación de tratamiento de congelación de grasa

1. Limpie la piel primero, luego frote los productos sobre la piel tratada, use anticongelante cuando se trabaja con mango criolipólisis.
2. De acuerdo con el estado de la parte gruesa del cliente, ajuste la intensidad y el modo de vacío y tiempo de trabajo.
3. Encienda el sistema Cryolipolysis. Trabajando en la barbilla. Al mismo tiempo, puedes ajustar la intensidad del sistema con el botón de la máquina.
4. Después del tratamiento, haga una pausa en el trabajo, luego apague la alimentación.



Ajustes del Tratamiento

1. El tiempo de tratamiento en cada sitio del cuerpo es de 20-30 minutos (dependiendo del grosor de la grasa y estado de salud).

Aviso: sugiera el primer tratamiento durante 8-10 minutos para realizar la prueba, luego, si todo está bien, puede iniciar el tratamiento durante 20-25 minutos..

2. Elimine parte de la grasa corporal por parte, es decir, se requiere completar algunos cursos para eliminar la grasa de toda la cintura.
3. Después de un curso, tome otro proceso de congelación para tratar la misma ubicación durante 2-3 Meses, lo que puede reducir el exceso de grosor de grasa. Un tratamiento tan secundario

puede consolidar el efecto de disolución de la grasa, pero los tratamientos múltiples no son recomendados .

4. El tratamiento de congelación de grasa está diseñado para aquellas personas físicamente sanas que tienen depósitos de grasa locales, pero no adecuados para la persona con obesidad general. Puede apuntar en la grasa en una parte específica, como la cintura, el abdomen, la espalda, etc. El tratamiento no es una panacea, no se puede tratar la obesidad. No es un sustituto de la liposucción u otros tratamientos invasivos. La pérdida de peso sustancial se debe lograr a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular, el tratamiento de congelación de grasas solo puede eliminar la grasa extra.

Clasificación de Riesgos SANITARIOS

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles