

**MANUAL DE USO:  
ELECTROCAUTERIO CON  
ALTA FRECUENCIA**

**MARCA: SILUET PERFECT.**



**Funciones:**

1. Promover la circulación sanguínea, fortalecer la actividad de la glándula linfática y proporcionar nutrientes para la epidermis, expulsar sustancias nocivas.
2. La reacción al calor del producto en el tejido de fibra, mejora la transparencia celular, ayuda a que el disolvente penetre en la piel.
3. Expedite el tejido metabólico de la fibra, ayuda a la piel a respirar y segrega residuos.
4. Con efecto desinfectante y antiflogístico, ayuda a curar heridas.



Control del electrodo de detección: mejora la irrigación sanguínea de la piel de la sangre, evita la pérdida de vello, la luz es de color naranja.



Control del electrodo de detección: mejora la irrigación sanguínea de la piel de la sangre, evita la pérdida de vello, la luz es de color naranja.



Cuchara como electrodo de control: se utiliza para el tratamiento suave de la piel, la luz es de color naranja.



Caída como control de electrodo: se utiliza para curar la inflamación local de la piel, la luz es naranja.

### **Principio de funcionamiento:**

-Ayuda a calmar el nervio y tiene función analgésica.

Produce el ozono para la esterilización, puede ayudar a curar las heridas y restringir los poros.

Mejorar la secreción, el valor de pH, hace que la piel se incline hacia la neutralidad.

Acelerar la circulación sanguínea y mejorar el metabolismo.

Tiene la función de anti-envejecimiento, antiarrugas y apriete.

### **Parámetros:**

Voltage: AC220V-240V; AC 100-110V

Working Frequency: 50-60HZ

Power: 10W

Dimension: 33\*21\*6CM G.W.:

1KG

**ESTE EQUIPO ES SOLO PARA USO ESTETICO**



Esta máquina es sugerida para ser utilizada por profesionales. La máquina de eliminación de manchas promueve la necrosis de las células epidérmicas a través de la coagulación eléctrica de alta frecuencia, se puede limpiar la cara y las

manchas de la superficie de la piel en un instante, como las manchas de la edad, pecas, granulación, delineador de ojos, tatuajes, lunares y demás, sin sangrado, sin cicatrices, y el efecto es evidente.

**Función de la interface de control**



# Pasos de operación

1. Encienda el interruptor de encendido en la parte posterior de la máquina principal.
2. Inserte la manija de extracción de puntos en el conector de eliminación de puntos en la parte posterior de la máquina principal y luego atornille la cabina de cables. Por favor, preste atención para alinear en el conector al insertar.
3. Desinfecte la aguja del eliminador de manchas con alcohol.
4. Presione ▲ ▼ debajo del tiempo para configurar el tiempo de tratamiento, presione ▲ ▼ debajo de la intensidad para ajustar la intensidad.
5. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO para iniciar el tratamiento y la interfaz mostrará inicio.
6. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO para detener el tratamiento una vez que la aguja se haya alejado de la piel para evitar que la piel se lastime. Por favor, vuelva a poner la intensidad en 0 y apague la alimentación después del tratamiento.
7. Desinfectar la aguja con alcohol.

## Uso

### 1. Eliminación de manchas

1) Recorra la piel, donde se encuentre la mancha, con la aguja hasta que la mancha se vuelva negra quemándose. Las manchas pequeñas pueden ser eliminado al pasar la aguja 1 vez.

2) Para los puntos grandes, será mejor pasar la aguja 2-3 veces. Y el esteticista debe mantener el equilibrio de las manos y nunca temblar, al igual que el cliente, o esto hará que la herida se recupere y produzca cicatrices.

### 2. Remoción de lunares

Esta máquina es buena para la eliminación de lunares en la capa de piel pero no para el lunar hipodérmico. Retire el lunar con un pequeño toque y no rasque la piel del lunar una vez. Será mejor para la piel que se recupere la desinfección por alta frecuencia y frote un poco de esencia nutricional sila herida no tiene inflamación.

### 3. Eliminación de granulación.

Toca la raíz de la granulación con una aguja, quema 1 vez si es un poco de granulación. Y la granulación se caerá una semana después. Gran granulación necesita varias veces para eliminar.

## Precaución

1. Una vez finalizado el tratamiento, apague la alimentación y retire la aguja para limpiar y esterilizar.
2. Mientras pincha el lunar, no debe insertar la punta de la aguja en la piel para no quemar la dermis.
3. Si no elimina todas las pecas a la vez, puede intentarlo de nuevo después de haberlo raspado. No inserte demasiado profundo o dejará cicatrices o agujeros convexos cóncavo.
4. No elimine demasiados lunares a la vez. Normalmente, elimine 3 a 5 lunares a la vez.
5. Sugiera no tocar el agua dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento. Y que el cliente no coma ningún alimento de pigmento profundo.

## Clasificación de Riesgos Sanitarios

*Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con*

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

*1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.*

*Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:*

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

**Rotulación.** Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

**Espacio físico externo.** El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios. Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

**En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:**

**Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México**

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles