

# Bitácora

---

## Modelo: MASAJEADOR G5 PROFESIONAL

### Marca: KORMISON

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

#### Numerales:

**-5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlos en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

**-5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

**Este equipo es exclusivamente para uso estético**

### CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

**Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:**

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

**Espacio físico externo.** El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

*En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:*

#### **Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México**

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

# **G5 MASAJEADOR DEMOLETOR DE GRASA PROFESIONAL**



## **Manual de Usuario**

## 1. Teoría

Este masaje de vibración adelgazante aplica vibración de alta frecuencia, que transferirá energía al tejido graso del cuerpo humano, promoverá la circulación sanguínea y acelerará la quema de grasa, por lo que el exceso de grasa y toxina se puede disolver y excretar rápidamente por la linfa y las glándulas sudoríparas. Mientras tanto, proporciona relajación de los músculos cansados.

## Aplicación

- Adelgazamiento corporal.
- Promueve la desintoxicación y el drenaje linfático.
- Eliminación de dolores musculares.

## 2. Estructura



## 3. Lista de sondas

Para todas las partes del cuerpo.



Para cuello, hombro, espalda, brazos y piernas..



## 4. Operación

- 1) Instale la máquina principal con la sonda y las piezas.
- 2) Cuelgue la manguera del cabezal vibratorio en el soporte.
- 3) Antes del masaje, es bueno aplicar un poco de aceite de masaje o talco para que la cabeza del maneral se mueva fácilmente..
- 4) Elija el cabezal de masaje suave o suave para iniciar el masaje y realice un movimiento lento.
- 6) Haga la operación de vibración baja a alta.

### ¿Cómo operar con diferentes cabezales?



Esta cabeza de esponja se utiliza principalmente en los puntos de acupuntura de todo el cuerpo, incluidos los de las plantas.

Se sugiere aplicar un trozo de película desechable en el área de tratamiento.

Velocidad de vibración sugerida: 800 rpm.



Actúa como “dedos masajistas”. La vibración de los puntos afilados puede suavizar eficazmente la grasa dura y aliviar el dolor.

Velocidad de vibración sugerida: 2400-4000 rpm.



Esta sonda tiene como objetivo la piel rugosa, arrugada y la grasa blanda. Actúa tanto en la epidermis como en los tejidos profundos de las fibras, disolviendo la grasa y suavizando las arrugas mediante masajes.

Velocidad de vibración sugerida: 1600-2400 rpm.





Esta sonda se usa en áreas con una gran parte de los músculos, como la zona de la espalda. Conduce a los músculos a completar el ejercicio pasivo, lo que puede eliminar la fatiga muscular, hacer que las articulaciones sean más flexibles y consumir grasa.



Esta cabeza con forma de cuenco se utiliza principalmente en los puntos de acupuntura de todo el cuerpo, incluidos los de las plantas. Se sugiere aplicar un trozo de película desechable en el área de tratamiento.

Velocidad de vibración sugerida: 800 rpm.

Realice la operación con el método correcto de la siguiente manera:

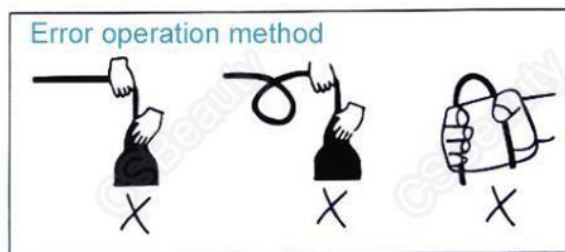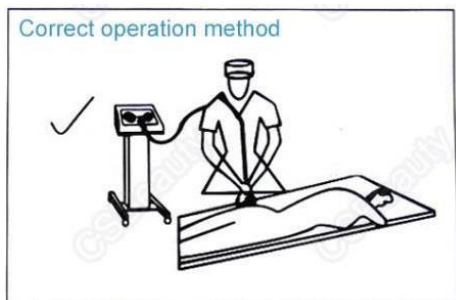

## 5. Notas

- 1) La máquina es una máquina de belleza profesional, debe ser operada por un esteticista profesional calificado.
- 2) No inicie la máquina antes de que su cliente esté listo.
- 3) No retire el cabezal vibratorio centrífugo usted mismo.
- 4) No engrase la máquina ni el eje de transmisión. El eje y el eje de transmisión se sellan y lubrican automáticamente.
- 5) Limpie la máquina y las piezas de repuesto con un jabón suave y agua tibia en lugar de alcohol o detergente.
- 6) No use la máquina en la parte de inflamación, sangrado, piel herida o lesionada.
- 7) La máquina no es para personas que contraen tromboflebitis como enfermedad linfática.
- 8) La máquina no es para personas que padecen de tuberculosis pulmonar o falta de oxígeno.
- 9) La máquina no debe utilizarse en mujeres embarazadas, mujeres durante el período menstrual o bebés..

## 6. Parámetro del producto

<b>Item No.</b>	JF689
<b>Descripción</b>	Máquina de adelgazamiento de masaje de vibración
<b>Voltaje</b>	AC110/220V ,60/50 Hz
<b>Energía</b>	100 W(Max)
<b>Cabeza de masaje</b>	5 PCS
<b>Color</b>	Blanco
<b>Peso del embalaje</b>	15.5 KG
<b>Packing size</b>	79*45*33 CM