

# GIMNASIA PASIVA Celeste MANUAL DE USUARIO


**MARCA: SILUET PERFECT.**



Esta gimnasia pasiva cuenta con 10 puertos de pulsos que pueden conectar 20 piezas de electrodos a diferentes áreas del cuerpo, con 6 teclas de función únicas y 12 grupos que configuran programas de computadora en su interior. No importa la gordura, el adelgazamiento, el ejercicio físico, los esteticistas ahora pueden operarlo de forma gratuita para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Si el cliente tiene necesidades especiales, los esteticistas también pueden configurar los programas de computadora de más de 100 tipos por cuenta propia para operar esas demandas especiales..

- 1: Start/Pause Indicator
- 2,3: Work / Stop
- 4: Speed Models
- 5,6,7: Speed Shown (3 Models)
- 8: Error Warning Indicator
- 9: Timer Display
- 10,11: Time Up / Down
- 12: Program
- Select 13-16: Program Shown (P1; P2; P3; P4)
- 17: Auto
- Program
- 18: Auto Indicator
- 19-28: Min—Max Adjuster
- 29-38: Output Port
- 39: Cable Input
- 40: Fuse
- 41: Power ON/OFF
- 42: 220/110V Change Button

**Panel Description:**

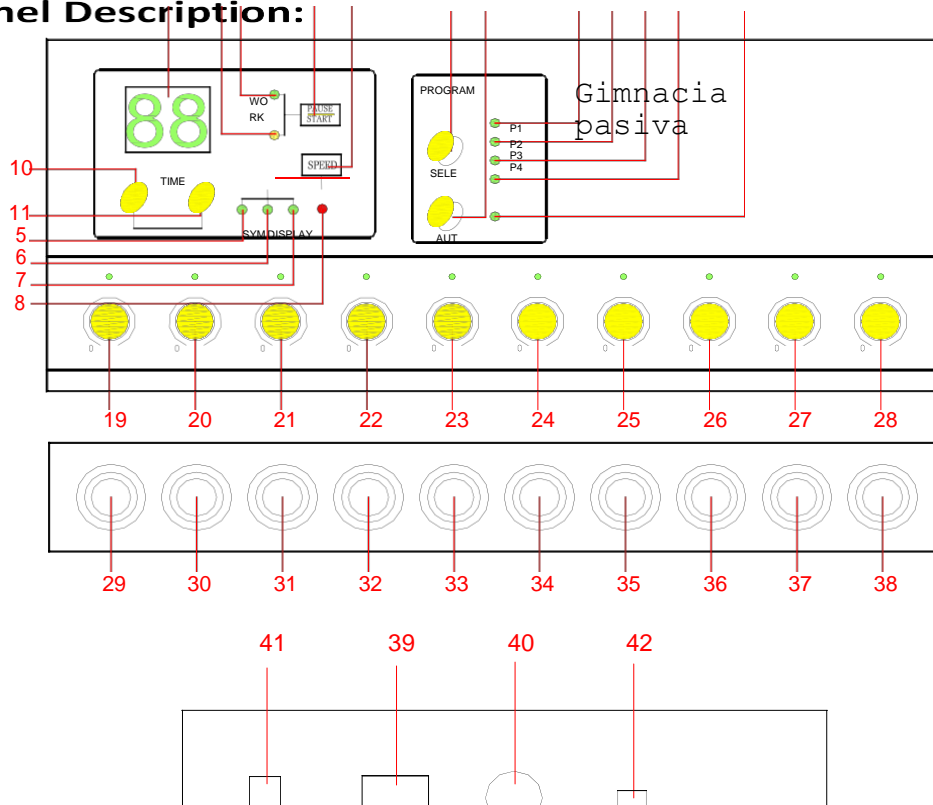

## Instrucción:

1. Antes de la operación, primero configure el botón de intercambio de 220/110 V para que se ajuste a su voltaje local (por ejemplo: voltaje local de 110 V, configure la máquina a 110 V a través del ajuste y configure el botón de intercambio de 220/110 v, a 220 V, del mismo modo configurado. ).
2. Conecte la máquina a su voltaje local, encienda la máquina, en este momento, el temporizador se muestra en 30 minutos.
3. De acuerdo con las demandas de operación, ajustar el temporizador a un tiempo de trabajo correcto. El máximo trabajo..


## Panel descripción:


1: Iniciar/Pausa	2,3: Indicador de Trabajo/Parada
4: Velocidad	5,6,7: Velocidad mostrada (3 Modelos)
8: Indicador de advertencia de error	9: Pantalla
10,11: Aumentar / Disminuir tiempo	12: Selección de programa
13- 16: Programa mostrado (P1; P2; P3; P4)	17: Auto programa
18: Indicador automático	19-28: Ajustar Min—Max
29-38: Puerto de salida	39: Cable de salida
40: Fusible	41: Encendido ON/OFF
42: 220/110V botón de cambio	

## Método de operación


1. Enchufe la fuente de alimentación, cambie el botón de selección de energía de 110V / 220V a la posición de 110V, encienda la fuente de alimentación en el panel posterior, y habrá una visualización de tiempo en el panel de instrumentos y el programa estará configurado en 30 minutos.
2. Si es necesario, presione los botones de aumento de tiempo o de disminución de tiempo 10 y 11 en el panel para configurar el tiempo de operación (si no se ponen todos los grupos de modulación de potencia en la posición cero, el instrumento sonará una alarma. El instrumento detendrá la Alarma 5 minutos después de que todas las modulaciones de potencia se ponen en la posición cero). El tiempo máximo de operación es de 60 minutos..

### Manual de operación.

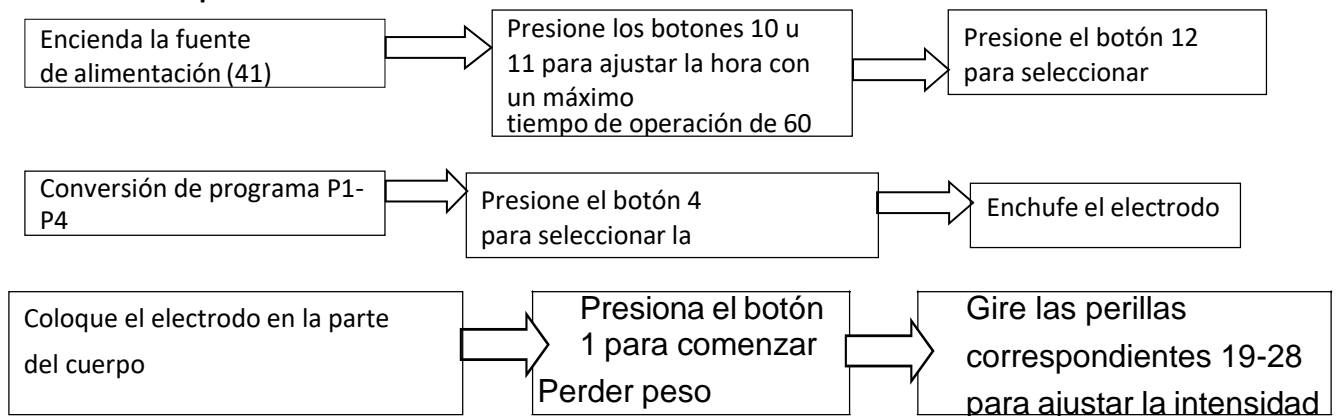

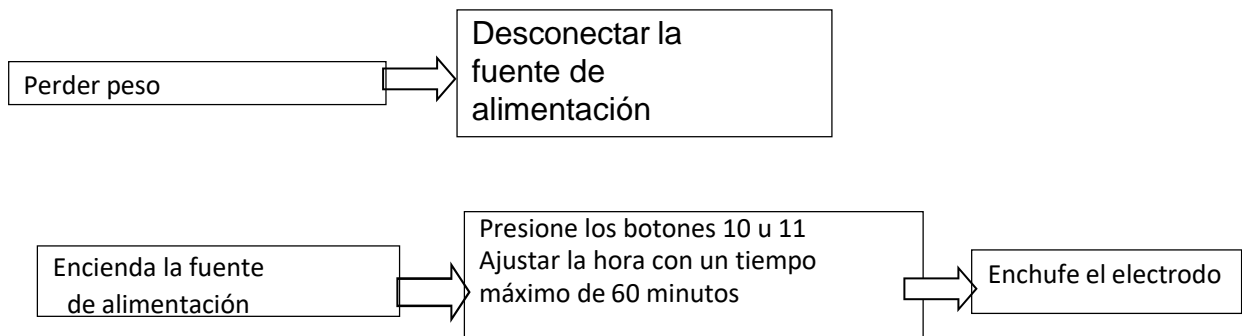

### Operación Automática

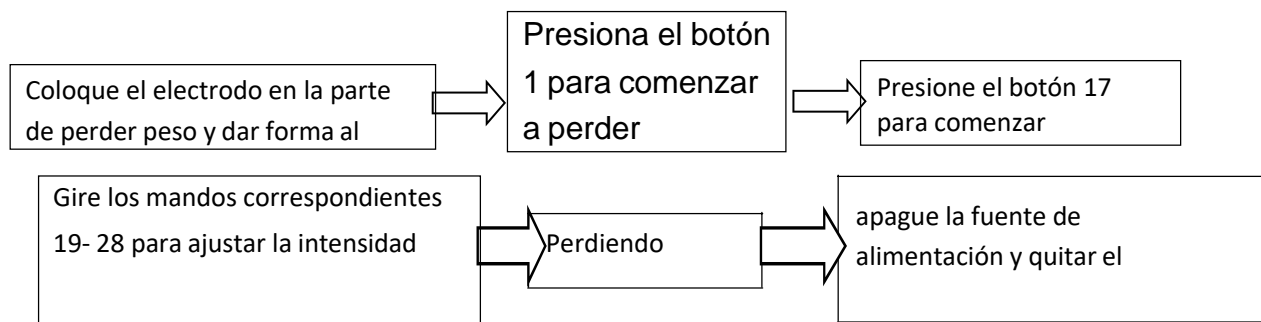

## Descripción del programa:

**P1:** para ajustar la liberación muscular y eliminar el dolor y el dolor muscular, trabajar como masaje de la piel.

**P2:** para adaptarse al área de los senos, músculo en las piernas y cuerdas de los brazos, y mejora de glúteos y ubres

**P3:** para ajustar el movimiento biónico (encordar los músculos, quemar grasa extra).

**P4:** para reducir la gordura, eliminar las células de gordura extra mediante la operación de masaje de alta intensidad, para adelgazar el cuerpo.

Nota: cuando elija un programa, el microordenador dentro de la máquina ajustará automáticamente la velocidad de operación para obtener el mejor efecto de acuerdo con el programa establecido.

### Atención!

1. De acuerdo con el tamaño del área de pérdida de peso, seleccione diferentes piezas de electrodo. Básicamente, la pieza del electrodo se debe utilizar en contacto cercano con la piel con la pieza grande del electrodo para áreas grandes y pequeñas para áreas pequeñas.
2. Antes de usar, seleccione un líquido conductor exclusivo para perder peso o agua limpia (en lugar de un líquido aceitoso) para aplicar a la superficie de la piel y la pieza del electrodo para que se humedezcan. Mientras usa el vendaje, asegúrese de que la pieza del electrodo entre en contacto con la piel. La superficie seca y el mal contacto con la superficie pueden picar al usuario, un punto necesario para que el operador lo recuerde.
3. No coloque los dos electrodos cerca del corazón en caso de que la señal pase a través del corazón

y provoque molestias.

4. 4. Para la parte que se va a operar, caliente con vapor durante unos 10 minutos, aplique una loción dedicada y masajee durante 5-10 minutos, limpie la piel con una toalla húmeda o una servilleta húmeda, ajuste el botón de intensidad para aumentar la intensidad de la corriente gradualmente hasta que El usuario puede sentir ligeramente el voltaje debajo de la pieza sensorial. Mientras opera el instrumento, la intensidad de la corriente debe mantenerse dentro del rango aceptable para el usuario.
5. 5. No lo utilice para mujeres embarazadas o personas con conductor metálico en el interior, así como para personas con inflamación supurativa aguda.
6. 6. Se sugiere que la aplicación en la cara debe ser lo más cuidadosa posible (trate de evitar el uso).

### Parámetros técnicos

Programa	Corriente eléctrica (MA)	Rango de frecuencia (HZ)
P1	0.01-3	0.5-4
P2	0.015-10	0.8-5
P3	0.03-10	1-7
P4	0.05-11	1.2-8


### Solución de Problemas

problema	Método de solución
No hay corriente a través de la pieza del electrodo.	Reemplace conexión con la salida
La corriente pierde el control sobre su tamaño.	Reemplace el instrumento actual






### Especificaciones:

Volt.	potencia	Hz.	Temp.	G.W.	Tama
220/110 V	40W	50/60Hz	5-40°C	5.8kg	47*39*22c m

### Mapa de croquis para puntos de acupuntura electroterapéutica.

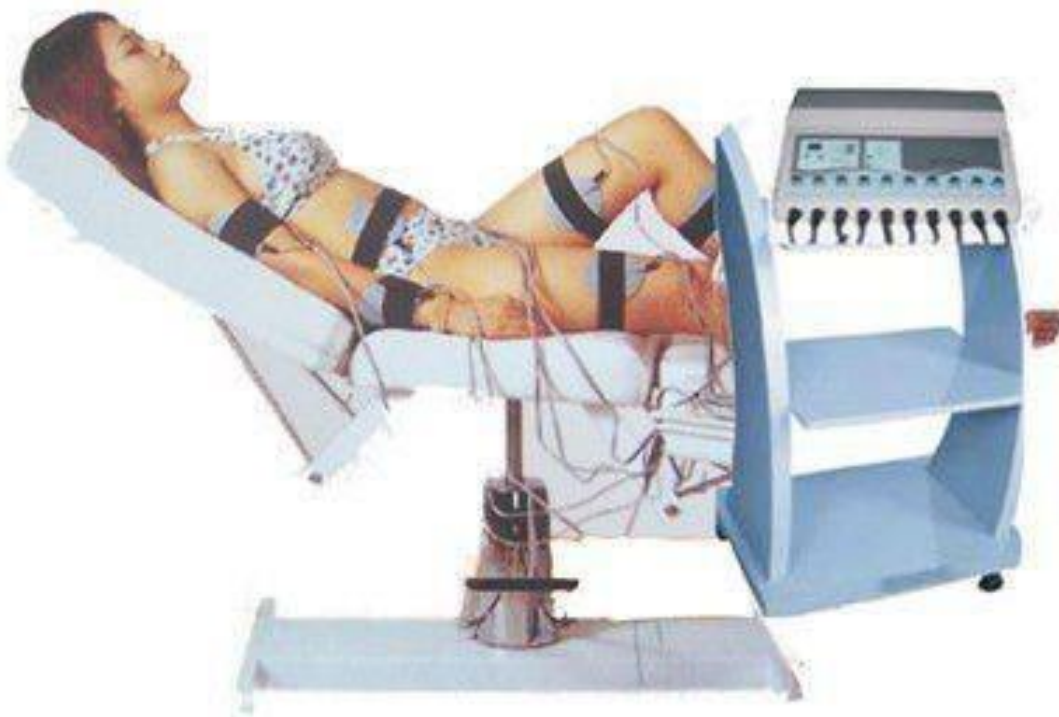

Mapa de referencia para la inserción de piezas sensoriales para perder peso y adelgazar el cuerpo (las imágenes con el mismo número son del mismo grupo)

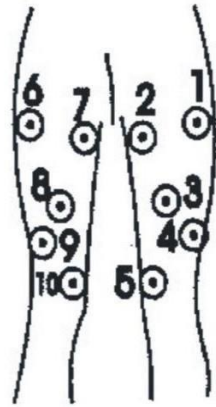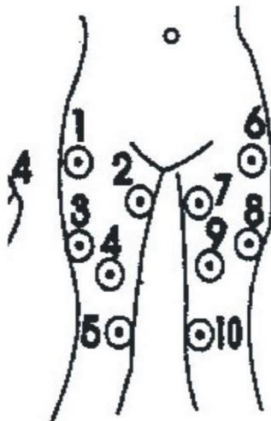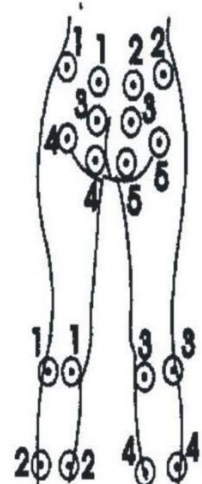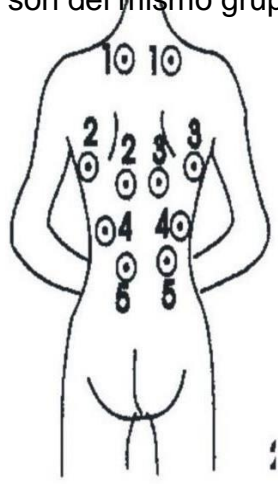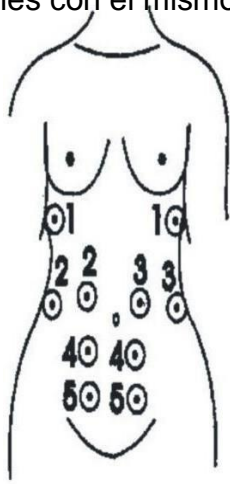

# Clasificación de Riesgos SANITARIOS

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

**Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:**

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

**Rotulación.** Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

**Espacio físico externo.** El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

**En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:**

#### **Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México**

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles