

Modelo: MANTA

TERMICA

Marca: SILUET PERFECT

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

**-5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

**-5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

***Este equipo es exclusivamente para uso estético***

## **CONTENIDO:**

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

*Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:*

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

*En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:*

### **Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México**

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

# **MANTA TERMICA**

## **MANUAL DE USO**



## **BREVE INTRODUCCION**

Las mantas de adelgazamiento infrarrojo son actualmente las máquinas de belleza más populares que funcionan en la pérdida de peso, modelar el cuerpo y desintoxicar. Es un reemplazo efectivo de todos los programas tradicionales para la pérdida de peso en salones de belleza como sauna, vapor y desintoxicación. Además, son convenientes y fáciles de operar. Resuelve problemas de administración del cuerpo. Para los amantes de la belleza. Esta manta no requiere inyección, medicación ni operación, por lo que no tiene efectos secundarios. Se usa externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato. Manta adelgazante infrarroja es una belleza de pérdida de peso en forma de manta instrumento, que funciona a través del efecto de energía térmica que hace sudar el cuerpo humano. El área de cobertura es grande, que puede cubrir todas las partes debajo del cuello del cliente. 3 los pasos de calentamiento, transpiración, disminución de la temperatura ayudan con la desintoxicación y se desmayan humedad redundante con sudor, logrando así el resultado de reducir el peso y cuerpo adelgazante.

## **VENTAJAS**

1. El efecto de energía térmica de la manta adelgazante infrarroja acelera el metabolismo, por lo tanto promoviendo la descomposición rápida de las células grasas; Completa la trilogía de modelado corporal rápidamente: aflojar adiposo, combustión rápida de adiposo, liberar adiposo, logrando así el resultado de reducción de peso y adelgazamiento corporal.
2. La operación es simple, conveniente, ahorra tiempo, ahorra trabajo, es segura y efectiva.
3. Sin medicina, sin inyección, sin dieta, sin ejercicio, sin efectos secundarios.
4. El rayo infrarrojo lejano es un tipo de luz reproductiva, que es invisible. Puede restaurar el diámetro de los vasos sanguíneos, mejorar la circulación de qi y sangre, y fortalecer metabolismo.
5. En invierno, puede destapar el qi y la sangre del cuerpo, calentar las manos y los pies, mejorar el sueño calidad y ayuda a conciliar el sueño de manera más efectiva.

## **PRINCIPIOS DE TRABAJO**

Usando vapor seco infrarrojo, acelera la circulación sanguínea, promueve la metabolismo del cuerpo, lograr el efecto de la terapia física del cuidado de la salud para el cuerpo. Equipado con control digital ajustable, el infrarrojo lejano puede disolver la grasa a través del calor, de acuerdo con la situación de la temperatura de diseño del cliente, promover la sangre circulación, promover el metabolismo, reducir la acumulación de grasa, promover el sudor y grasa subcutánea, para lograr la pérdida de peso, el efecto de embellecer el cuerpo. Al mismo tiempo puede fisioterapia reumatismo y otros síntomas. Con el uso de aceite esencial, crema adelgazante, productos para el cuidado de la piel corporal, etc., puede lograr los efectos de aromaterapia, adelgazamiento, desintoxicación y lubricación de la piel.

## **EFFECTOS**

1. Activa la actividad de macromoléculas biológicas.
2. Promover y mejorar la circulación sanguínea.
3. Acelerar el metabolismo y aumentar los nutrientes musculares.
4. Reduce la inflamación y la hinchazón.
5. Acelerar el metabolismo y promover la rápida descomposición de las células grasas.
6. Afloje la grasa y quémela rápidamente.
7. Mejorar el insomnio, el estreñimiento, los trastornos endocrinos, la artritis y otras enfermedades. Mejorar la inmunidad humana.
8. Promueva la absorción del producto, de modo que los nutrientes en el producto puedan penetrar en la piel más fácilmente.
9. Mejore la microcirculación humana y mejore la vitalidad celular.
10. Reponer la vitalidad del cuerpo humano, eliminar la fatiga y aumentar la fuerza física.

## **RANGO APLICABLE**

1. Aquellos con obesidad sistémica y obesidad parcial.
2. Aquellos que quieren perder peso pero no quieren hacer ejercicio.
3. Aquellos que tienen mucha grasa corporal y acumulación de grasa que sobresale.
4. Las personas con falta de sueño, insomnio, sueño y trastornos endocrinos.
5. Aquellos con un metabolismo pobre.
6. Aquellos que a menudo se sienten cansados debido a que frecuentemente se quedan despiertos hasta tarde.
7. Aquellos trabajadores de oficina que se enfrentan a la computadora durante largas horas.

## **RANGO INAPLICABLE**


1. Las personas con hipertensión, enfermedades cardíacas, epilepsia, diabetes y graves. Hipertiroidismo.
2. Aquellos con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.
3. Aquellos cuyas heridas no han cicatrizado y que se están recuperando de la operación.
4. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
5. Aquellos que están teniendo una reacción alérgica o aquellos con piel súper sensible.
6. Aquellos con trauma en la piel o herida.
7. Los que están borrachos, llenos, vacíos, sedientos y con exceso de trabajo

## NOTAS DESPUES DE OPERACIÓN

1. Ducharse 4-6 horas después de la operación.
2. Vístase a tiempo después de la operación, manténgase caliente.
3. No coma inmediatamente después de la operación para evitar indigestión y malestar estomacal.
4. Beba más agua caliente para reponer agua y acelerar el metabolismo.

## OPERACIÓN DETALLADA

Después de verificar que el instrumento está conectado correctamente, se inicia lo siguiente. La interfaz aparecerá cuando la fuente de alimentación esté encendida.

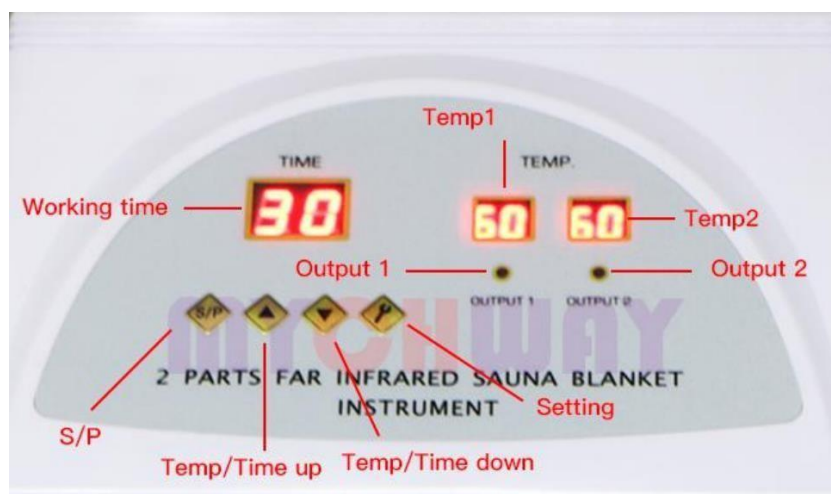

## **PARAMETROS TECNICOS**

Material: PVC

Poder: 650w

Frecuencia: 50Hz-60Hz

Voltaje: 110 V o 220-240 V

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener cuidado al usar este instrumento. Consulte a un médico o profesional antes de usar el instrumento. Los detalles son como sigue:

1. Las personas con hipertensión, enfermedades cardíacas, epilepsia, diabetes y graves. Hipertiroidismo.
2. Aquellos con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.
3. Aquellos cuyas heridas no han cicatrizado y que se están recuperando de la operación.
4. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
5. Aquellos que están teniendo una reacción alérgica o aquellos con piel súper sensible.
6. Aquellos con trauma en la piel o herida.
7. Los que están borrachos, llenos, vacíos, sedientos y con exceso de trabajo.

## **NORMAS**

1. Use un pin de conexión a tierra y asegúrese de que la toma de corriente del dispositivo esté correctamente conectado antes de cada operación.
2. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea apropiado. Si el voltaje del local la fuente de alimentación es inestable, recomendamos que los usuarios aumenten la potencia correspondiente voltaje.
3. Para garantizar el efecto terapéutico y la expectativa de vida útil normal del dispositivo, utilice los accesorios especificados provistos o recomendados por el original fabricante.
4. El dispositivo no debe colocarse en un ambiente húmedo o cerca del agua, ni debe estarán directamente expuestos a la luz solar.
5. No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor fuerte, ya que esto puede afectar la vida y uso normal del dispositivo.
6. Los pacientes que padecen enfermedades deben consultar con un médico y obtener permiso del doctor antes de usar.
7. Apague el interruptor de alimentación del dispositivo y asegúrese de que la energía total el suministro del dispositivo se apaga antes de que el personal se vaya después del uso diario, a fin de Garantizar la seguridad de los productos eléctricos.

8. Utilice el dispositivo o entrene a los operadores del dispositivo siguiendo estrictamente las instrucciones del manual de usuario.
9. Al tomar otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomarlos por 1 a 2 meses antes del tratamiento. Se recomienda la extensión del curso del tratamiento. Si desea perder peso de inmediato.
10. No use el instrumento con el estómago vacío. Después de una comida completa, espere al menos 1 hora antes de un curso de tratamiento de pérdida de peso.
11. Limpie el instrumento con solución salina normal después de la operación para garantizar su limpieza e higiene y prolongar su vida útil.
12. Deje de usar si el daño del cuero ocurre en la superficie de la manta.
13. No encienda la alimentación cuando esté plegado; no pegue las mantas superiores e inferiores juntas y usar a alta temperatura.
14. Durante la operación, el usuario deberá remover objetos metálicos en el cuerpo y entrar desnudo (o usar ropa interior desechable), y la cabeza estará expuesta.

## **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

### **1. El instrumento no se puede iniciar, pero la luz de la tecla en la parte posterior del instrumento ¿No funciona?**

A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente válida.

B. Si el tubo del fusible en la parte posterior del instrumento está suelto o quemado.

### **2. ¿No hay sensación térmica después de encender el instrumento?**

A. Compruebe si la manta adelgazante está conectada con el cable de conexión.

B. Compruebe si hay algún daño en el cable.

C. Si los métodos anteriores no pueden resolver el problema, comuníquese con el distribuidor local del instrumento de asistencia.

## **LISTA DE CONTENIDO DE EMPAQUE**

1 Unidad central

1 Cable de alimentación

1 Juego de manta

## OPCION DE OPERACIÓN

### Adelgazamiento corporal: 40 min, 2-3 veces / semana

Tiempo de operacion: 40-60 min Temperatura: 40-70 °C	Toalla fresca + manta adelgazante infrarroja	1. Extienda el infrarrojo manta adelgazante, adjunte el dos cables de conexión con el puertos principales de salida de la máquina y asegúrate de que se queden conectado. 2. Hacer que el cliente se acueste dentro de la manta y cremallera. 3. Establecer tiempo, temperatura y encienda la máquina, 45 min. 4. Apague la máquina. 5. Desconecte los cables con el máquina principal. 6. Cierre la manta. 7. Limpie el sudor con toalla fresca
---	--	--

#### Tratamiento Sugerido:

Diez tratamientos representan un curso completo. En etapas anteriores puedes hacerlo 2-3 veces a la semana. Después de 2 cursos, puede cambiar a 1-2 veces por semana. Después de un tratamiento, el cuerpo se sentirá relajado y mejorará la circulación sanguínea. Después de un curso completo, la grasa corporal es reducida gradualmente y al mismo tiempo la piel se siente más suave y fina. Después de 2. Por supuesto, la línea curva comienza a mostrarse y la ropa te queda mejor. Después de 3 cursos los adiposos redundantes desaparecen gradualmente, la curva en S y la cintura delgada comienzan a tomar forma.

# Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.