

MANUAL DE USUARIO MICROCIRCUK

MARCA: SILUET PERFECT.



Tres funciones

- Dermabrasion De Diamante
- Vacío
- Rociar

Estructura de la máquina



El paquete incluye

Modo de máquina de dermoabrasión de
diamante número 108 x1
Manguera de vacío de PVC
6 * 4 x1 Varillas de aluminio
x3
Puntas de diamante x9
Paquete x2 de filtro de
algodón Conector, anillos de
tubos y fusibles. Spray
botellas x2

Presupuesto

Voltaje: 110V-

240V Potencia:

22W

Tamaño de embalaje:

30x26x24 G. W: 2.2kg

Microderbrasion de diamante

Función

Diamond Microdermabrasion proporcionó un procedimiento no quirúrgico para el acabado de la piel, utilizando cabezas de diamante estériles para desgastar o raspar la capa superior de la piel, luego aspirar las partículas junto con la suciedad y la piel muerta de nuevo. Este procedimiento elimina los residuos de la piel, las imperfecciones, las manchas, las arrugas y el Micordermabrashion no deseado, se acompaña de productos para la piel que penetran a través de la capa superior de la piel hasta el nivel de la dermis, ayuda a reponer los nutrientes naturales, restablece la actividad celular y promueve la salud de la piel. Los resultados después del tratamiento con Diamond Microdermabrasion suelen ser una piel saludable, brillante y hermosa.

Accesorios

				
Manguera de PVC	Anillos de goma y fusibles	Filtro de algodón grande	Filtro de algodón pequeño	Caja de color

Preparación antes del tratamiento

1. Una consulta incluyendo el examen de la piel, un plan de tratamiento..
2. La operación debe usar guantes de vinilo y una mascarilla..
3. En la piel grasa o con acné, se puede usar un vaporizador antes del limpiador.
4. 3. Limpie la piel con un gel o agua de limpieza, luego limpie con un algodón. Deja que la piel se seque.

Instrucción de operación

1. Conecte todos los accesorios a la máquina.
2. Desatornille el conector de vacío, asegúrese de que haya un filtro de algodón grande en el centro y un anillo negro grande alrededor del cabezal de conexión.
3. Enrosque el conector después de verificar. Luego conecte la manguera de PVC al conector.
4. Coloque el otro extremo de la manguera de PVC en el extremo de la varilla.
5. Coloque un pequeño filtro de algodón en la cabeza de la varita (un pequeño anillo negro está alrededor de la cabeza)
6. Enrosque la punta de diamante en la varita.
7. Coloque el enchufe en la toma de corriente y encienda el botón de encendido. Gire la perilla de intensidad al lado izquierdo.
8. Ajuste la intensidad de vacío lentamente de mínimo a máximo, el medidor de vacío mostrará la fecha de presión. Para uso común, no ajuste la intensidad al máximo a menos que sea necesario.

Intensidad de vacío recomendada en el área de tratamiento

Area de tratamiento	Piel normal (en Hg)	Piel sensible (en Hg)
Cara	12-22	8-12
Frente	12-22	10-12
Pecho	15-20	15-18
Nariz	10-15	10-14

Cuello	18-18	10-15
Zona cercana a los ojos	8-12	8-10

Tabla de horarios de tratamiento

Tratamiento	Frecuencia	Visitas totales
Peeling facial	6-10	3-5
Lineas finas	7-13	6-8
Cuello	12-14	3-5
Cicatriz de acne	7-12	8-10
Hiperpigmentacion	7-12	8-10

9. Coloque el diamante que tenía en la superficie de la piel (comience desde la frente), proceda con un movimiento de deslizamiento lento. No deje la punta del diamante en el lugar por mucho tiempo, ya que podría dañar la piel.
10. Estire suavemente la piel con el pulgar y el dedo y deslice la pieza de mano de 2 a 3 veces sobre el área a tratar. Luego, vuelva a cruzar en diferentes direcciones para evitar líneas de rayas como en la imagen de referencia. Los cepillos o los movimientos de pulido se pueden usar en diferentes sitios.
11. Después del tratamiento, cepille toda la piel muerta restante con un cepillo suave y enjuague con esponjas húmedas o una toalla húmeda y fría.
12. Deje que la piel se seque y luego aplique el producto de piel deseado.
13. Para limpiar la cabeza de diamante, use un cepillo de dientes o un algodón humedecido con un poco de alcohol para limpiar la impureza sucia, y luego use luz UV o alta temperatura para la esterilización.

DIAGRAMAS DE MOVIMIENTOS Y ÁREAS SUGERIDAS PARA LA DERMABRASIÓN

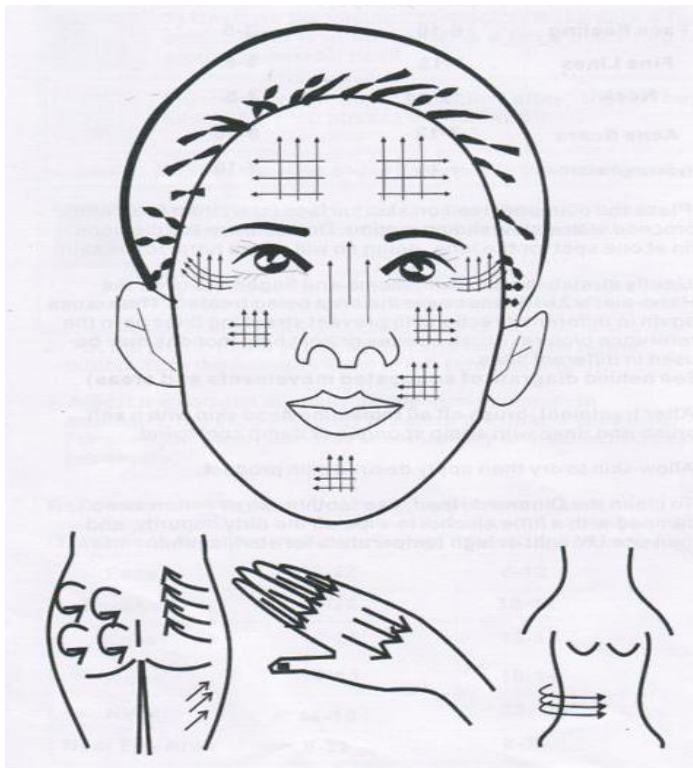


Diagrama de puntas y varillas de dermoabrasión de diamante

2 varillas de acero inoxidable que se utilizan con 9 puntas de diamante intercambiables.

1		Cuerpo, especialmente para áreas de acné, rodilla, codo y estrías del embarazo..
2		Cara. Por las grandes imperfecciones..

3		Para cicatrices, líneas finas e imperfecciones..
4		Utilizado en los ojos y ambos lados de la nariz. Para arrugas, tabletas de aceite, espinillas y acné.
5		Después del procedimiento de exfoliación con puntas D, use esta punta suave para aspirar / limpiar la piel desgastada.

1. Limpie las puntas de diamante con alcohol, luego esterilícelas con luz UV o alta temperatura.
2. Reemplace el filtro de algodón grande dentro del conector de vacío después de cada cinco a seis tratamientos.
3. Vuelva a colocar el pequeño filtro de algodón en la cabeza de la varita después de cada tratamiento.

Calentamiento de seguridad

Nunca opere este equipo en una persona que sufra lo siguiente:

- A. enfermedad del corazón
- B. piel sensible
- C. piel dañada
- D. piel inflamada
- E. Piel flexionada

No usar en las siguientes áreas.:

1. piel sensible
2. Erupción cutánea
3. Piel dañada, inflamada o infectada
4. Cicatriz quirúrgica menor de 12 meses. Piel hinchada
5. Las sondas no deben apuntar directamente hacia el globo ocular.
6. No usar en los genitales.

Función de vacío / pulverización

Función

La función de vacío se utiliza para limpiar la suciedad de los poros a través de los tubos de succión. También puede aumentar la circulación sanguínea de la piel. Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y puede disminuir la decoloración del acné y las cicatrices.

La función de rociado es ideal para rociar lociones, agua perfumada o aceites esenciales. Puede limpiar, purificar, suavizar y estimular la piel.

Accesorios



Botellas de spray x 2
(Para spray)



Ventouse de vidrio x 3
(Para vacío)



Mangueras
(Para spray)

Instrucción de operación

No conecte la manguera de la botella de spray al zócalo de vacío, de lo contrario, el tóner será aspirado a la bomba y acortará la vida útil de la máquina. No haga funcionar la aspiradora y la pulverización al mismo tiempo.

Función de vacío

1. Conecte la manguera al conector de vacío (OUPUT), conecte el otro extremo con la cámara de vidrio.
2. Ajuste la perilla de intensidad de vacío para la succión que desea.
3. Use su dedo para presionar el poro en la ventana de vidrio, la fuerza de succión aumenta.

Aviso :

1. Ventosa de vidrio tiene forma de tres tipos, se adoptan diferentes áreas de vidrio de forma diferente.
2. Cuando aspire la mancha negra, es mejor colocar una película de algodón en la ventanilla de vidrio para evitar dañar la máquina principal.
3. No lo use en la cara por mucho tiempo, de lo contrario la cara sería corneada.
4. Ventosa de vidrio debe estar limpio y seca.
5. Función de pulverización
 1. Conecte la manguera roja al conector de pulverización, conecte el otro extremo con la botella de pulverización.
 2. Use el dedo para presionar la parte superior de la botella, el tóner está atomizado.
 3. Rocíe hacia abajo desde la frente del cliente. Deje que el cliente cierre los ojos y la boca evitando que entre líquido, al mismo tiempo no permita que el líquido fluya por la nariz del cliente. Por favor, mantenga la botella de la cara en la distancia adecuada.
 4. La boca de esterilización debe estar clara, no rocíe el tóner con impureza o deposición.
 5. Después de usar, apague la fuente de alimentación.

Clasificación de Riesgos SANITARIOS

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación: Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia. Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores. Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios. Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012. En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso. Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición. Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes. Seguridad e Higiene. El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios. Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal. Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas. En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo: Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles.