

# Bitácora

---

**Modelo: MICRO HIDRO PINK**

**Marca: SILUET PERFECT**

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

**-5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

**-5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

***Este equipo es exclusivamente para uso estético***

## **CONTENIDO:**

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario

**Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:**

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio. Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables. Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

**En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:**

### **Artículo 107.-... DE LA LEY de salud de la ciudad de México**

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetos a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

# MANUAL DE USUARIO MICRO HIDRO PINK



## PREFACIO

El Micro-crystal Dermabrasion fue diseñado por el italiano Mattioli de Florencia en un principio, hasta ahora tenía más de 20 años de historia. Este tipo de tecnología solo se suministra al experto en dermatología y al médico en los primeros usos, pero cada vez más SPA House & Beauty Saloon también lo usa gradualmente, se lo llamó el mejor método de belleza médica. Este método se ha desarrollado con éxito en Europa durante varios años, cura a pacientes en miles de ejemplos y ha obtenido un efecto extremadamente satisfactorio.

Ahora queremos presentar la dermoabrasión de diamante, es una mejora creativa de la dermoabrasión de microcristales. La dermoabrasión con diamante proporcionó un procedimiento de restauración de la piel no quirúrgico mediante el uso de cabezas de diamante estériles para raspar o frotar la capa superior de la piel y luego aspirar las partículas junto con la suciedad y la piel muerta. Este procedimiento elimina los residuos de la piel, las imperfecciones, las manchas, las arrugas y la pigmentación no deseada de la piel. El uso moderado de Diamond Dermabrasion, acompañado de productos para la piel que penetran a través de la capa superior de la piel que llega al nivel de la dermis, ayuda a reponer los nutrientes naturales, restaurar la actividad celular y promover la salud de la piel. Los resultados después del tratamiento de Micro Dermabrasion suelen ser una piel sana, brillante y hermosa.

La máquina Water Microdermoabrasion cambió por completo la forma tradicional, que consiste en limpiar la piel a mano basándose en las habilidades prácticas del individuo, la máquina Water Microdermoabrasion, que utiliza el modo de succión al vacío controlado por un proceso inteligente, a través de la combinación de productos y equipos, limpieza profunda de la piel y los poros. Elimina la córnea, el acné, los puntos negros y otras impurezas en un período de tiempo muy corto. Y mejora la absorción profunda de los productos de nutrición, promueve los poros.

Aprieta, alisa la piel, aumenta la humedad de la piel y hace que tu piel blanquee la hidratación y la buena textura. Oxígeno o una combinación de aire comprimido limpio y solución nutritiva, adsorción/líquido en la piel del mango, la solución nutritiva utiliza la forma de adsorción por presión de succión hasta que la piel se infiltra en la dermis, limpia profundamente la piel, elimina eficazmente los alérgenos de la piel y los ácaros del sebo, el cabello ácaro del folículo, tratamiento del acné, el acné tiene un buen efecto. Los nutrientes agregados en la solución básica en la piel limpia complementan la nutrición de la piel al mismo tiempo, lo que puede mejorar efectivamente el ambiente de la piel, mejorar el metabolismo de la piel.

Dermoabrasión con agua Hydra: la dermoabrasión con agua es una tecnología NUEVA y emocionante que combina la eficacia de la microdermoabrasión, el sistema de vacío y el nuevo sistema de hidratación Aqua Fuse. Es mucho más suave que la microdermoabrasión con cristales o la dermoabrasión con diamantes, ya que solo se usa agua y utilizamos máquinas de calidad profesional.

hydra -dermoabrasion (o hydra microdermoabrasion) aplica peeling mecánico y químico simultáneamente.

Una máquina de hidra-dermoabrasión incluye un chorro de agua, un compresor de aire, una válvula de control de flujo de dos vías, un recipiente purificador y un tanque de aguas residuales.

La exclusiva punta de hidra-dermoabrasión lanza chorros de agua delgados y diminutos y pule la piel a alta velocidad mediante succión al vacío, cuyo líquido ayuda a hidratar la piel mientras tanto.

La principal ventaja de estas máquinas de hidradermoabrasión radica en que es muy suave al usar solo agua y permite la diversificación del tratamiento al usar productos para el cuidado de la piel para diferentes funciones como aceite esencial, productos blanqueadores, ácido láctico, ácido salicílico y más, para lograr varios objetivos a petición de los clientes.

## PISTOLA PULVERIZADORA DE OXÍGENO


El equipo de belleza de inyección de oxígeno en agua sin aguja adopta un método no invasivo sin rastros y sin daños. extrayendo el oxígeno en el aire y comprimiéndolo en factor activo mediante un filtro molecular, el oxígeno se libera en la piel y se inyecta en la piel mediante la máquina. Es una forma eficaz y segura de enviar oxígeno a la piel, para eliminar las arrugas y suavizar la piel. .

### FUNCIÓN:

- 1 . Quito las líneas finas
2. Inyección de oxígeno, piel activa
3. Reparar la piel profundamente, piel sana fuertemente

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DERMOABRASIÓN CON DIAMANTE Y DERMOABRASIÓN CON AGUA

1. En primer lugar, coloque la manguera de vacío de tamaño 6x4 en el enchufe de ENTRADA y inserte un hisopo de algodón en la cabeza de diamante, luego apriete la cabeza de diamante en la pieza de mano. Retire el hisopo de algodón después de cada tratamiento.
2. Enciende el botón de encendido.
3. Ajuste la intensidad de vacío mediante el regulador de vacío de acuerdo con la siguiente tabla de referencia, la intensidad se muestra en el indicador de vacío y verifique con el cliente para mayor comodidad.

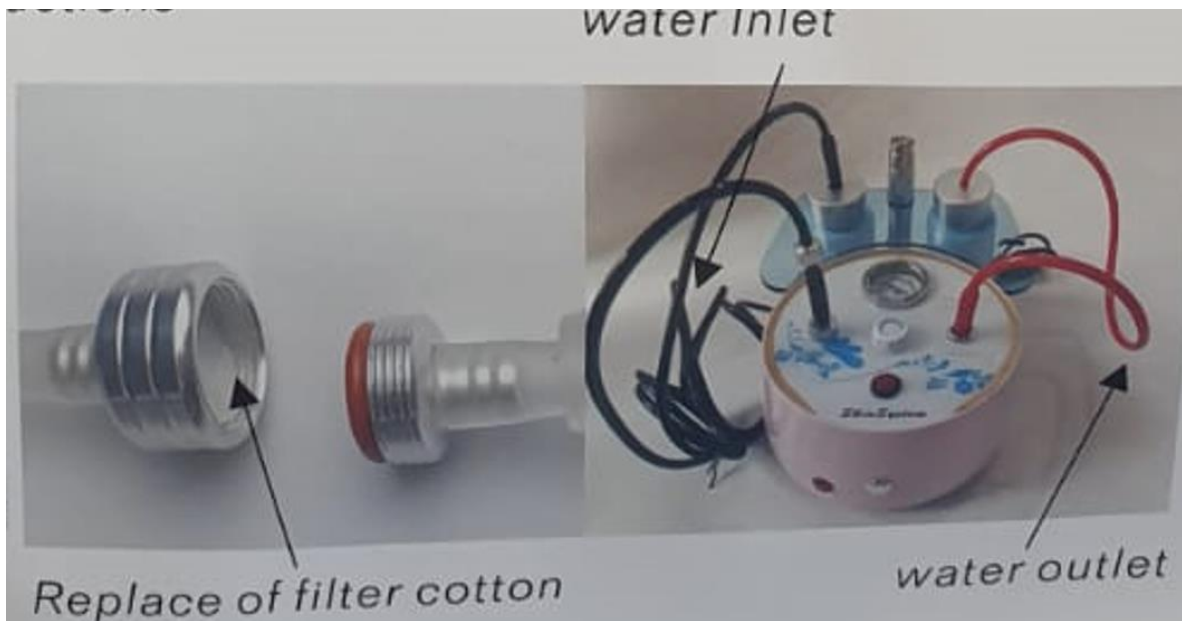

### INTENSIDAD DE VACÍO RECOMENDADA EN EL ÁREA DE TRATAMIENTO

AREA DE TRATAMIENTO	PIEL NORMAL	PIEL SENSIVLE
CARA	12-22	8-12
FRENTE	12-22	10-12
PECHO	15-20	15-18
NARIZ	10-15	10-14
CUELLO	18-18	10-15
CERCA DE LOS OJOS	8-12	8-10


### TABLA DE PROGRAMA DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO	FRECUECUENCIA(DÍAS)	TOTAL DE VISITAS
PEELING FACIAL	6-10	3-5
LINEAS FINAS	7-13	6-8
CUELLO	12-14	3-5
CICATRICES DE ACNE	7-12	8-10
HIPERPIGMENTACION	7-12	8-10

4. Enciende el botón de encendido.
5. Ajuste la intensidad de vacío mediante el regulador de vacío de acuerdo con la siguiente tabla de referencia, la intensidad se muestra en el indicador de vacío y verifique con el cliente para mayor comodidad.
6. Use el área inclinada de la pieza de mano para hacer contacto con la superficie de la piel. Proceda con un movimiento deslizante lento. No coloque la pieza de mano en un lugar durante demasiado tiempo, ya que podría dañar la piel.
7. Ajuste la tasa de flujo de cristal con el regulador de vacío lentamente desde el mínimo hasta el máximo. Para uso común, no configure el caudal al máximo a menos que sea por necesidad. Esto es para una mejor intensidad de confort.
8. Estire suavemente la piel con el pulgar y el índice y deslice la pieza de mano de 2 a 3 veces sobre el área a tratar.

Luego cruce de nuevo en diferentes direcciones para evitar rayas como en la imagen de referencia. Se pueden usar pinceladas o movimientos de pulido en diferentes sitios.

## ESQUEMA DE MOVIMIENTOS SUGERIDOS Y AREAS PARA DERMABRACION

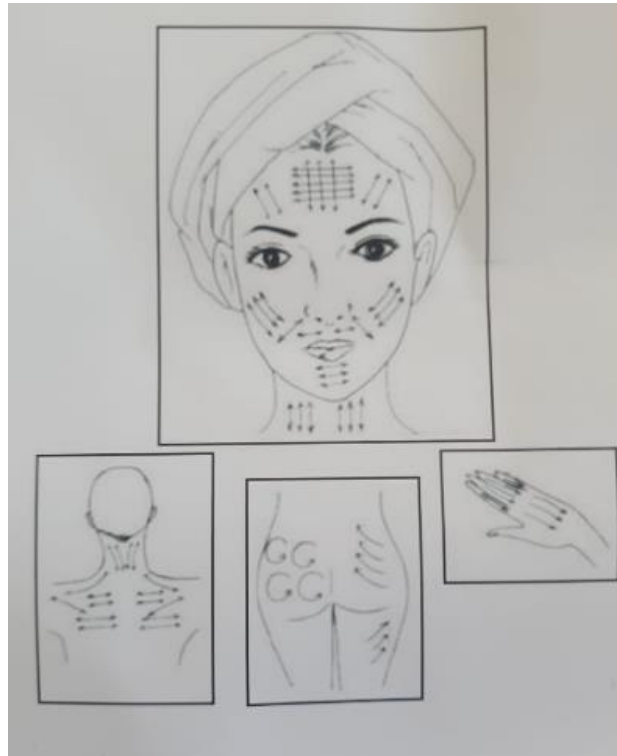

## SIGA LA DIRECCIÓN DE LAS FLECHAS.

9. Después del tratamiento, cepille toda la piel muerta restante con un cepillo suave y enjuague con esponjas húmedas o una toalla fría húmeda.
10. Permita que la piel se seque y luego aplique el producto deseado para la piel.
11. Para limpiar la cabeza de diamante, use un cepillo de dientes o un bastoncillo de algodón humedecido con un poco de alcohol para limpiar las impurezas sucias y luego use luz ultravioleta o alta temperatura para la esterilización.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Aviso importante de precaución antes de usar esta máquina:

Nunca opere este equipo en una persona que tenga o sufra de las siguientes condiciones médicas que se describen a continuación. (El salón o el operador pueden considerar que un cliente firme una renuncia en el sentido de que él/ella está libre de problemas de salud).

1. Enfermedad del corazón
2. Soplo cardíaco o frecuencia cardíaca irregular
3. Tiene un marcapasos u otro tipo de equilibrador de frecuencia cardíaca.
4. El embarazo
5. Epilepsia
6. Alcoholismo
7. Úlceras
8. Enfermedad del Estómago, Intestino, Hígado o Páncreas.
9. Cáncer de mama.
10. Someterse a tratamiento para cualquier forma de cáncer.
11. Se sometió a una cirugía mayor en el último año.
12. Asma
13. Resfriado, gripe o malestar estomacal
14. Cualquier enfermedad grave o enfermedad no mencionada anteriormente.

### NO LO USE EN ESTAS ÁREAS:

1. Piel sensible
- Erupción cutánea  
Piel dañada, inflamada o infectada.  
Cicatriz quirúrgica de menos de 12 meses.  
Piel Hinchada.  
Las sondas no pueden apuntar al globo ocular.  
Genitales.

1 . Comience siempre el tratamiento de forma conservadora y observe los efectos por el tacto y la apariencia de la piel. Una potencia de vacío demasiado alta o demasiado grande puede provocar una respuesta inflamatoria.

2. El edema y el eritema pueden ocurrir después del tratamiento, pero se resolverán en pocas horas.
3. Las técnicas demasiado agresivas pueden causar una ligera descamación durante los próximos 3-4 días. La epidermis que se trata demasiado agresivamente puede provocar sangrado en la dermis superficial.
4. Diamond Dermabrasion no debe usarse en áreas sensibles como los párpados. Los párpados deben estar cerrados en todo momento durante el procedimiento y pueden cubrirse con almohadillas de algodón húmedas.
5. Las siguientes áreas se consideran inapropiadas para el tratamiento: tumor de piel, lunares, marcas de nacimiento, angiomas, labios, ojos, herpes, cáncer de piel y manchas hepáticas.
6. No modifique ni intente reparar la máquina, comuníquese con el técnico para el mantenimiento.

## Solución de problemas

Si la máquina no funciona correctamente, siga estos procedimientos antes de solicitar mantenimiento.

1. Baja potencia de succión/baja presión de vacío:

Vuelva a comprobar que la manguera de vacío debe estar bien conectada al enchufe y luego a las piezas de mano. Y luego gire el regulador de vacío al máximo, y luego comience la dermoabrasión de diamante, y luego use el dedo para bloquear el orificio de las piezas de mano. Normalmente, el indicador de vacío puede alcanzar las 24 pulgadas Hg.

## CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.