




# GALVANICA

## MANUAL DE USO



## CARACTERÍSTICA

- 1, Operación simple
- 2, Bajo costo
- 3, Pequeños efectos secundarios
- 4, Nueva tecnología

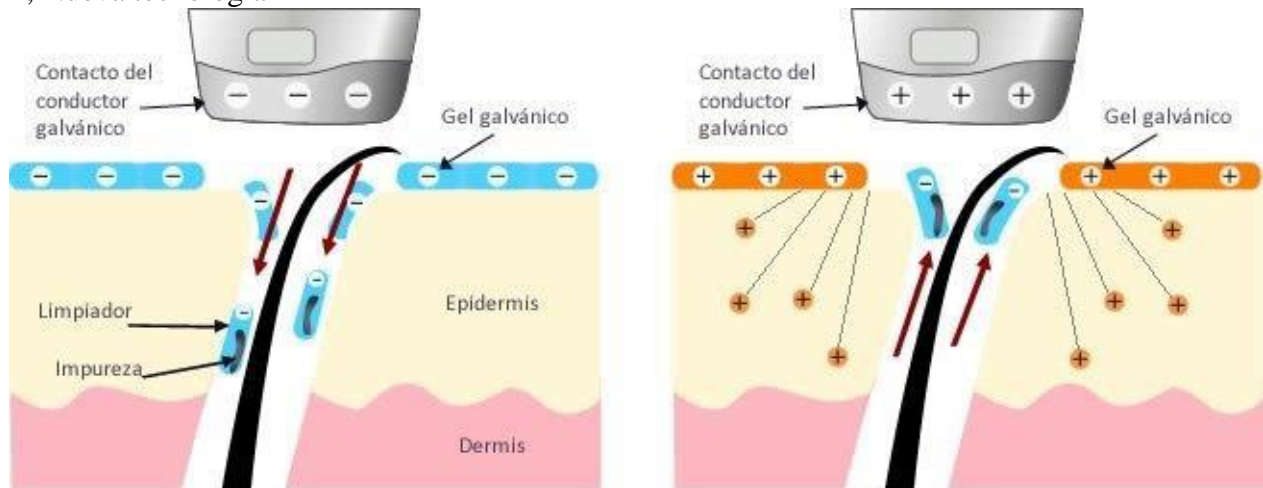

## GALVÁNICO

Los dispositivos cuentan con ambos: iontoforesis negativa y modos de iones positivos. La característica adicional es de 2 cabezales desmontables para tratar superficies o curvas más o menos planas. La cabeza del rodillo es especialmente buena para trabajar con productos para la piel solubles en agua y no grasos, donde la falta de lubricación, causa potencial de estiramiento indeseable de la piel, se compensa con el movimiento de rotación del rodillo. El uso de la corriente galvánica le permite drenar todas las toxinas e impurezas de la piel y los poros más profundos y, utilizando la polaridad opuesta de los iones, ingresa nutrientes en la piel más profunda y la nutre para aumentar el colágeno y combatir las arrugas. La limpieza de iones es un medio eficaz para prevenir el acné / las imperfecciones y liberar los poros de los desechos. La iontoforesis es una de las mejores formas de infundir nutrientes en la piel utilizando productos para el cuidado de la piel.

## ELIMINACIÓN DE OXÍGENO ACTIVO

La eliminación del oxígeno activo por la vitamina C intracelular puede evitar que la onda UVA de penetración profunda provoque roturas de doble cadena del ADN nuclear y daños a los componentes de la base del ADN, como 8-OHdG. La provitamina C puede ser, en el nivel de ADN, una resistencia a la edad que prolonga significativamente la vida celular al evitar que el ADN de los telómeros ubicado en ambos extremos de los cromosomas se acorte.

## COMO USAR EL EQUIPO

El equipo cuenta con su panel de control en el cual puede controlar la intensidad de trabajo con los botones de + y -.

Los cabezales se colocan alineando tanto el lado donde se incrusta en el equipo y el lado del cabezal, para cambiarlo se puede estirar el cabezal para removerlo y colocar el segundo.

## **Clasificación de Riesgos SANITARIOS:**

**Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con**

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos.

Entrando en Clasificación Clase I.-Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906,908,909,1084,1085,1096,1226,1269,1282,1283,1319, 1321,1328, 1329,1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

